

Inhalator INSALIN

Inhalatorul Insalin emite micro-particule uscate de sare, fiind astfel eficient ca terapie adjuvanta in tratarea diverselor afectiuni ale cailor respiratorii superioare si inferioare: astm bronic, bronhite, sinuzite, rinite, alergii respiratorii, etc.

1. Se scoate InSalin din pungă de pastrare din plastic.
2. Se agita ușor inhalatorul și se verifica prin fereastra transparenta starea stratului de sare. Granulele de sare trebuie sa nu fie aglomerate
3. Se prinde ușor cu buzele capatul de sus al dispozitivului. Se inspira pe gura și se expira pe nas, în ritm normal, fara efort. Se evita inspiratia profunda, fortata;, deoarece poate produce o tuse neplacuta, iritativa.
4. Inhalatorul trebuie sa fie in pozitie verticala și se poate verifica într-o oglinda felul în care „fierbe” stratul de granule.
5. La sfarsitul tratamentului se recomanda stergerea mustiucului cu un servetel curat și apoi se pune inhalatorul în punga de pastrare.

