

Tub protecție al degetelor de la picioare din silicon

Tubul are un strat interior din gel, oferind protecție și ameliorarea durerii cauzate de bătăături sau de frecarea degetelor de la picioare. Previne astfel apariția unor noi bătăături.

Mod de folosire: Tăiați tubul de lungimea necesară și plasați-l pe deget ca pe un inel.

Recomandări: Produsul poate fi spălat și reutilizat. Presărați un pic de pudră de talc peste el când este uscat. Nu purtați produsul mai mult de 16 ore pe zi. Nu purtați produsul peste răni deschise.

Consultați doctorul înainte dacă suferiți de diabet sau aveți circulație.

A nu se păstra la îndemâna copiilor.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros, bine aerisit, ferit de lumina soarelui.

A se păstra în ambalajul original până la folosire.

Acesta este un dispozitiv medical pentru uz extern

Producător: Orkla Cederroth, SAU. Pol. Ind. Can Barri C/D no 11-12, 08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spania

www.salvequick.com

Distribuitor în România: Maresi Foodbroker SRL,

Arad, str 9 Mai, nr 3, tel 0257-281177

SQ.17.0