


# EMOFIX RO

Nome:	EMOFIX RO
Codice:	20FG982
Tipo Carta:	USOMANO 60gr/mq bianco
F.to carta:	150x200 mm.
Piega:	SI finito 25 mm
Stampa:	1 colore P.2755

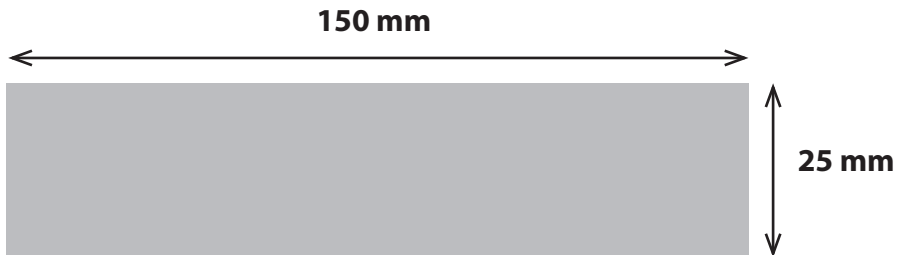

4 bozza  
del  
19-09-2019

# EMOFIX<sup>®</sup>

RO

## Unguent protector hemostatic

**Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de folosirea produsului.**

### 1. Ce este Emofix<sup>®</sup> și pentru ce se utilizează

Emofix<sup>®</sup> este un unguent hemostatic indicat pentru limitarea și prevenirea afecțiunilor hemoragice cutanate și ale mucoaselor precum epistaxis traumatic sau esențial, mici răni ale pielii, etc.

### 2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Emofix<sup>®</sup>

Nu folosiți produsul dacă aveți cunoștința de hipersensibilitate (reacție alergică) la oricare dintre componentele produsului (prezentate la punctul 6).

### 3. Cum se utilizează Emofix<sup>®</sup>

**Pentru a opri un episod hemoragic:** se aplică o cantitate suficientă de unguent pentru a acoperi zona afectată.

**Pentru a preveni epistaxisul recurent:** se aplică unguentul de două ori pe zi pentru o perioadă de cel puțin două săptămâni după episodul acut sau după indicațiile medicului.

Folosirea aplicatorului inclus în pachet este recomandată în cazul aplicării unguentului pe mucoasa nazală.

Curățați cu atenție aplicatorul după fiecare folosire și evitați utilizarea lui de către alte persoane.

### 4. Atenționări:

- În cazul apariției reacțiilor adverse opriți tratamentul și consultați medicul.
- În primele zile de tratament pot apărea mâncărimi nazale, senzația de arsură și rinoree, care tind să dispară în cursul terapiei. Dacă aceste senzații nu dispar, opriți tratamentul și consultați medicul.
- Verificați integritatea flaconului înainte de folosire.
- Nu utilizați produsul după data de expirare menționată pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corect.
- Nu folosiți acest produs dacă ambalajul original nu este intact sau dacă există dovezi de alterare (de exemplu, dacă este reetichetat). Modificarea și/sau alterarea integrității ambalajului ar putea compromite cerințele de siguranță ale produsului.

### 5. Cum se depozitează Emofix<sup>®</sup>

- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- După utilizare închideți etanș tubul.
- A nu se depozita la temperaturi de peste 30 °C. Dacă este depozitat la temperaturi mai scăzute produsul poate deveni compact, iar la temperaturi înalte poate deveni foarte fluid, dar această variație nu influențează calitățile terapeutice ale acestuia. Prin menținerea produsului la temperatura ambiantă, acesta va reveni la consistența inițială.

### 6. Alte informații

**Compoziție:** Amestec de acizi grași saturați, extract de proteine din drojdie, fosfatidilcolină, vitamina E acetat, ceară de albine, ulei de soia, alcool stearilic, cloruri de calciu, potasiu, magneziu, gliceril monostearat, p-hidroxibenzoat de metil și de propil, BHT.

### Ambalaj:

flacon de 30 g cu aplicator nazal.

### Importator:

S.C. 3F Plantamed S.R.L.,  
Calea Victoriei 103-105, Sector 1, București  
Tel: 021 316 8931, Fax: 021 312 9580  
www.3fplantamed.ro



PlantaMed

Produs destinat pieței din România.

PRODUS ÎN ITALIA



**DMG Italia srl**  
via Laurentina Km. 26,700  
Pomezia (Rome) - ITALIA  
www.dmgit.com

CE  
0 3 7 3



20FG982\_4-19/09/2019

09/2019