

COLPOFIX® OVULE

10 | OVULE VAGINALE

INDICAȚII:

Prevenția și tratamentul uscăciunii vaginale nespecifice inclusiv în cazul atrofiei vaginale. Adjuvant în caz de iritații, arsuri și mâncărimi vaginale, precum și în afecțiuni vaginale de natură inflamatorie și infecțioasă.

Colpofix® Ovule este indicat pentru femeile aflate la vârsta fertilității, la menopauză sau la perimenopauză.

INFORMAȚII:

Colpofix® Ovule este un dispozitiv medical care ajută la menținerea mecanismelor naturale de apărare ale vaginului și facilitează refacerea florei vaginale; formula specifică pe bază de acid hialuronic și acid lactic ajută la eliminarea simptomelor datorate dezechilibrelor de hidratare vaginală și/sau pH-ului vaginal. Acidul hialuronic are o acțiune hidratantă și lubrifiantă împotriva uscăciunii vaginale, facilitând refacerea mediului vaginal. Acidul lactic, prezent în mod natural în vagin, favorizează corecția imediată a pH-ului și facilitează refacerea naturală a ecosistemului vulvo-vaginal delicat. Policarbofil interacționează cu mucusul vaginal eliberând în mod constant ioni de hidrogen (H⁺), ce contribuie la reducerea pH-ului mediului vaginal.

INGREDIENTE:

Acid hialuronic (hialuronat de sodiu), Policarbofil, Acid lactic, vitamina E, vitamina A, Acid 18-beta gliciretinic, ulei de arbore de ceai, fosfatidilcolină, trigliceride semisintetice.

POSOLOGIE:

Introduceți în vagin 1 ovul/zi, preferabil seara înainte de culcare, timp de 5-7 zile de la terminarea ciclului menstrual sau conform indicațiilor medicului, dar nu mai mult de 30 de zile consecutive. Produsul este compatibil cu utilizarea prezervativului.

MOD DE UTILIZARE:

- 1) Spălați bine părțile intime (de preferință atât la exterior, cât și interior cu soluție vaginală);
- 2) Deschideți ambalajul și, după ce v-ați spălat bine pe mâini, scoateți din blister un singur ovul;
- 3) Introduceți ușor ovulul în vagin, încercând să îl inserați cât mai adânc, de preferință în poziția decubit dorsal, evitând scurgerile accidentale.

DEPOZITARE:

A se păstra ambalajul bine închis, într-un loc uscat, între 5 și 25°C, departe de surse de lumină și căldură.

Dispozitiv medical

CE 0425

 Uriach

 LABOREST®

ATENȚIONĂRI:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu înghiți. Nu utilizați produsul dacă pachetul nu este intact. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate dovedită la unul sau mai multe dintre componente. Nu utilizați produsul în caz de leziuni sau răni vaginale. A nu se utiliza în perioada menstruației. Nu depășiți doza recomandată, fără sfatul medicului. Utilizarea poate genera sensibilizare, în special dacă este prelungită. Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupeți tratamentul și consultați medicul pentru a stabili terapia adecvată. Este important să raportați medicului sau farmacistului apariția unor reacții adverse nedescrise în acest prospect.

PRECAUȚII DE UTILIZARE:

În cazul femeilor însărcinate, cât și al celor care alăptează, utilizarea ovulelor este recomandată doar în cazuri de necesitate efectivă și sub supravegherea directă a medicului. În cazul himenului intact, înainte de utilizare, consultați medicul ginecolog cu privire la modul de utilizare. Dispozitiv de unică folosință: nu reutilizați în caz de vărsare accidentală. Există risc de infectare în cazul reutilizării.

EXPIRARE:

Data de expirare se referă la produsul intact și depozitat corespunzător. Vezi data expirării de pe ambalaj. A nu se utiliza după data de expirare indicată.

Format: Pachet cu 2 blistere care conține 10 ovule vaginale de 2 gr/ovul

Data ultimei revizuirii: Noiembrie 2023

RECICLEAZĂ-MĂ!

Pentru un mediu mai curat, colectează separat deșeurile!

Pentru reciclarea corectă a ambalajelor urmați instrucțiunile primăriei dumneavoastră.

TIP	MATERIAL	COD.
CUTIE	HÂRTIE	PAP21
PROSPECT	HÂRTIE	PAP22
BLISTER	PLASTIC	O7

Legenda Simbolurilor



Marcaj CE



A se păstra între 5-25°C



Numărul lotului



Nu arunca în mediu după utilizare



Data expirării



Producător



Nu reutilizați



Consultați prospectul



ADL Farmaceutici s.r.l.
Piazza Grandi, 11
20129 Milano

Distribuit de: **Uriach România S.R.L.**
Strada Sirluiului 6-8, 014354, București, România

Dispozitiv medical

CE 0425



ROCOLPOV23FE