

69920 Compresa perineala x 8 bucati Lansinoh

Mod de utilizare: Asigurati-va ca gelul este distribuit uniform pe compresa, inainte de utilizare. Compresesele pot fi congelate sau refrigerate timp de cel puțin 24 de ore, pentru un efect de racire. Compresa ambalata individual se pune in pozitie orizontala, in frigider/congelator. Spalati-va bine pe maini inainte de a deschide compresa perineala. Dupa ce luati compresa din frigider/congelator, apasati usor ambalajul din plastic pentru a dezlipi compresa si a o scoate din ambalaj. Verificati temperatura compresei inainte de a o pune pe absorbantul de maternitate. Puneti compresa perineala peste absorbantul de maternitate. Schimbati compresa perineala frecvent sau in functie de nevoie. A se arunca dupa fiecare utilizare. Produs de unica folosinta. Inainte de utilizare, depozitati produsul pe orizontala intr-un spatiu racoros, intunecat, ferit de razele directe ale soarelui. Nu incalziti produsul. Pentru o eficienta maxima, utilizati produsul in termen de 3 luni de la congelare. A nu se recongela.

Precautii: A nu se lasa la indemana copiilor. Nu se utilizeaza la copiii cu varsta sub 12 ani. Numai pentru uz extern. Nu utilizati pe sani, mameloane, sau in apropierea gurii. Nu aplicati pe rani deschise. Daca apare iritatie, intrerupeti utilizarea si consultati medicul. Va rugam sa cititi toate instructiunile inainte de utilizare.

Ingrediente: Apa, Glicerina, Apa de Hamamelis Virginiana (Hamamelis), Guma Xantan, Suc de frunze de Aloe Barbadensis*, Acid Lactic, Benzoat de Sodiu, Sorbat de Potasiu, Alcool benzilic, Clorura de didecildimoniu (*Ingredient Organic). 100% vegan.

Importator/Distribuitor: Next Step Investments SRL; Bd.Tudor Vladimirescu nr.22; Cladirea Green Gate Offices et.5 birou 505; Sector 5 Bucuresti Tel:+40749060830, Email:office@nextstep.ro
www.nextstep.ro