

Miradent Plaque Agent – Soluție de clătire a dinților pentru identificarea plăcii bacteriene,

Cantitate : 250ml e

Art. 630186

Potrivit incepand cu varsta de 6 ani

- Depistează placa bacteriană!
- Miradent Plaque Agent pigmentează cu albastru depunerile existente pe dantură.
- Gust de gumă de mestecat cu aromă fructată.
- Cu xilitol.

În cazul copiilor cu vârsta de până la 6 ani produsul trebuie folosit numai sub supravegherea adulților.

Instrucțiuni de utilizare:

Pasul 1: Desfaceți capacul, apoi strângeți cu atenție flaconul până când măsura dozatoare din partea de sus a flaconului se umple cu lichid. Clătiți cavitatea bucală cu această cantitate de Plaque Agent timp de 30 de secunde și scuipați. Atenție: A nu se înghiți lichidul!

Pasul 2: Depunerile de placă bacteriană devin vizibile colorându-se în albastru.

Pasul 3: Apoi culoarea albastră se va elimina prin periaj dentar cu pastă de dinți.

Notă: Soluția albastră poate păta textilele și îmbrăcămintea. Aceste pete se elimină cu apă și detergent. Sugestie: folosiți în prealabil un balsam de buze gras pentru a evita colorarea buzelor.

Miradent Profilaxie profesională