

Scaun cu rotile din otel, pliabil, material textil, antrenare manuala, sezut 46cm

Cod produs: G099



NOTA: Acest produs este destinat persoanelor cu probleme medicale si ar trebui utilizat numai sub atenta supraveghere.

Fotoliu rulant G099 este un scaun confortabil, atat sezutul cat si spatarul sunt dintr-un material textil rezistent. Este pliabil, cu frane laterale manuale usor de actionat.

Caracteristici:

- sezut din material textil
- cadrul din otel
- frane laterale manuale
- 4 roti pline cu cadru din otel

Scaunele cu rotile manuale sunt dispozitive medicale pliabile, care pot fi deplasate prin efortul propriu al pacientului sau prin impingere de catre apartinator. Scaun cu patru roti este actionat manual, roata spate 61cm cu anvelope solide, frana pe roata motoare si roata fata solida.

Scaunul poate fi asamblat usor fara ustensile.
Scoateti produsul din cutie si asezati-l pe o suprafata plana.

Nota: Inainte de prima utilizare verificati daca produsul este complet montat si toate suruburile sunt stranse.

Atentionare: Nu depasiti greutatea maxim admisa.

Detaliile tehnice:

- Latime sezut: 46 cm
- Adancime scaun: 42 cm
- Inaltimea scaunului: 48 cm
- Latime totala: 68,5cm
- Inaltimea spatarului : 35 cm
- Inaltimea cotierei: 21 cm
- Inaltime totala: 85.5cm
- Roata fata: 18 cm
- Roata spate: 61 cm
- Latime la pliere: 27 cm
- Lungime totala: 97 cm
- Greutate: 12.78 kg
- Material scaun: otel
- Greutate max. utilizator: 100kg
- Dimensiuni colet: 89x24x87cm

Recomandare:

Scaunul cu rotile manuale este potrivit pentru utilizarea atat in casa cat si in aer liber. Poate fi folosit atat pe termen scurt, cat si pe termen lung de catre persoane care au un handicap locomotoriu ,cat si de persoane care nu se pot deplasa pe distante lungi.

Instructiuni de utilizare:

Pliere: Rabatati suporturile pentru picioare, apoi prindeti marginea din fata si din spate a tapiteriei cu ambele maini si trageți-o in sus.

Atentionari:

- Nu lasati pacientul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Nu utilizati in alte scopuri decat cele destinate.
- Nu folositi substante corozive sau materiale abrazive pentru curatare.
- Produsul nu ar trebui utilizat fara instructiuni din partea unui asistent specializat in ingrijirea persoanelor cu dizabilitati.
- Nu depasiti greutatea maxima admisa de fabricant!
- Nu ne facem raspunzatori de nici o vatamare sau ranire cauzata de utilizarea incorecta sau asamblarea eronata a produsului.

Intretinere:

- Spalati cu apa calda si detergent cu ajutorul unui burete moale.
- Clatiti cu apa rece si stergeti excesul de apa cu o carpa moale si uscata.
- Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.
- Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului si al protectiei materialului din care este confectionat.
- Ungeti cu regularitate suruburile si butoanele de ajustare pentru o utilizare indelungata.
- Depozitati in loc igienic.