

ENAC039-1 Filtru flux invers cupe Hands Free Importator: EduClass SRL Bd. Unirii nr.9, sect 4 Bucuresti, tel/fax 0213454540, email: contact@educlass.ro Reprezentant european: OBELIS S.A., Adresa: Av. De tervuren 34, bte 44, b-1040, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003, email: mail@obelis.net. Fabricant: Uzinmedicare Co., Adresa: Gyeonggi-Do 462-807, Coreea, Tel. +82-31-739-5271, email: master@uzinmedical.co.kr
Filtru de rezerva compatibil cu Set Cupe Hands Free (24 mm) si Set Cupe Hands Free (28 mm). Acest filtru de protectie creeaza o bariera fizica intre motorul pompei pentru san si lapte. Inlocuiti filtru de flux invers la aproximativ 3 luni, cand observati ca membrana de silicon din interiorul filtrului este deteriorata sau daca remarcati o scadere a puterii de vacuum . Material: plastic si silicon. Atentie! Nu se sterilizeaza. Se curata cu o carpa umeda. Asigurati-va ca filtru este uscat inainte de a fi atasat la pompa. Produs in Coreea. Atentie! Nu tineti produsul in apropierea unei surse de foc. Cod de bare: 0440000087586