

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Test de Sarcină Advent life cu afișaj digital pentru rezultate clare (Urină)

SCOPUL UTILIZĂRII

Testul de sarcină hCG digital Advent Life este un test de sarcină rapid și ușor de folosit. Este utilizat pentru detectarea calitativă a hCG în urina umană. Este destinat auto-testării, pentru diagnostic in vitro.

PRINCIPIU

În timpul testării, proba de urină reacționează cu particule acoperite cu anticorpi specifici. Acest amestec migrează ascendent pe membrana cromatografică prin acțiunea capilară, unde intră în contact cu anticorpii de captură fixați pe membrană, formând astfel o linie colorată pe banda de testare. Semnalul vizual generat este transformat într-un semnal electric de către o fotodiodă, care este ulterior procesat de un program și afișat clar pe ecranul LCD.

PRECAUȚII

Vă rugăm să citiți toate informațiile din acest prospect înainte de a efectua testul. Citiți măsurile de precauție enumerate mai jos pentru a asigura rezultate precise și funcționarea corectă a testului.

Protecția oferită de echipament poate fi compromisă dacă nu respectați instrucțiunile din acest manual.

Nu utilizați după data de expirare imprimată pe plicul sigilat.

- Pentru utilizare în interior.
- Utilizați, depozitați și transportați doar în condițiile specificate mai jos.
- Condiții de depozitare și transport: 2-30°C (35.6-86°F); ≤90% RH; 86-106 kPa
- Condiții de operare: 15-30°C (59-86°F); ≤90% RH; 86-106 kPa
- Nu utilizați dacă plicul este rupt sau deteriorat.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Pentru diagnostic in vitro. A nu se înghiți.
- Nu deschideți plicul sigilat al testului până când nu sunteți gata să începeți testul. Odată ce plicul a fost deschis, utilizați testul în decurs de o oră.
- Acest produs conține baterii. Testele utilizate trebuie aruncate în conformitate cu reglementările locale.
- Grad de poluare: II
- Nu reutilizați testul.
- Acest test digital pentru diagnostic in vitro (IVD) respectă cerințele privind emisiile și imunitatea electromagnetică. Măsurile de compatibilitate electromagnetică (CEM) implementate asigură o protecție adecvată împotriva interferențelor electromagnetice ce pot apărea în mediul casnic. Vă rugăm să verificați următoarele avertismente preventive:
 - a) Utilizarea dispozitivului într-un mediu uscat, în special dacă sunt prezente materiale sintetice (îmbrăcăminte sintetică, covoare etc.), poate cauza descărcări electrostatice dăunătoare care pot duce la rezultate eronate.
 - b) Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor puternice de radiație electromagnetică (cum ar fi telefoane mobile), deoarece acestea pot interfera cu funcționarea corectă a testului.

MATERIALE NECESARE

Materiale furnizate:

- 1 Test de sarcină hCG digital
- 1 Instrucțiuni de utilizare

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate:

- Cronometru sau ceas
- Recipient pentru colectarea urinei



INSTRUCȚIUNI

Important: Pe parcursul testării, nu țineți niciodată testul cu vârful absorbant îndreptat în sus.



CÂND PUTEȚI EFECTUA ACEST TEST?

Puteți face testul începând cu prima zi de întârziere a menstruației.

CUM SĂ UTILIZAȚI ACEST TEST

Pasul 1:

Când sunteți gata, scoateți testul din plicul sigilat și îndepărtați capacul.

Țineți dispozitivul de partea anti-alunecare, cu vârful absorbant îndreptat în jos.



Țineți ecranul de afișare orientat în sus și plasați vârful absorbant în jetul de urină timp de 5 secunde. Aveți grijă să nu udați cu urină suportul de plastic.


SAU



Colectați urina într-un recipient curat și uscat, apoi scufundați complet vârful absorbant în urină timp de 10 secunde.

Pasul 2:

Puneți capacul la loc și așezați testul pe o suprafață plană, cu ecranul orientat în sus

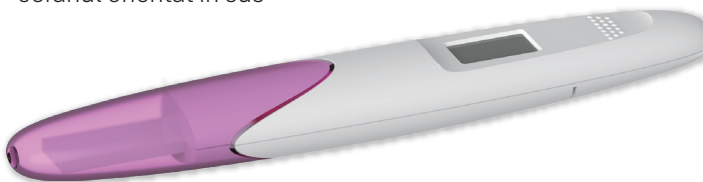

După aplicarea urinei, simbolul ceasului ⌚ va apărea și va clipi pe ecran, indicând faptul că testul funcționează.

Pasul 3:

În aproximativ 3 minute, rezultatul "YES+" sau "NO-" va apărea pe ecranul de afișare



Positiv (este sarcină)



Negativ (nu este sarcină)



3 minute



INTERPRETAREA REZULTATELOR



Dacă apare indicația YES+ pe afișaj, înseamnă că sunteți însărcinată.



Dacă pe ecran apare "NO-", înseamnă că nu sunteți însărcinată

Rezultatul dvs. va rămâne pe ecranul de afișare timp de aproximativ o oră. Dacă pe ecran apar alte rezultate, vă rugăm să citiți secțiunea despre Erori.

LIMITĂRI

Există posibilitatea ca acest test să genereze rezultate fals pozitive sau fals negative. Consultați-vă medicul înainte de a lua orice decizie medicală.

1. Medicamentele care conțin hCG (cum ar fi Pregnyl, Profasi, APL etc.) pot determina un rezultat fals pozitiv. Consumul de alcool și analgezicele care nu conțin hCG nu ar trebui să afecteze rezultatul testului.
2. Probele de urină foarte diluate, indicate de o densitate scăzută, pot să nu conțină niveluri reprezentative de hCG. Dacă se suspectează în continuare sarcina, ar trebui colectată o probă de urină de dimineață după 48 de ore și testată.
3. Acest test poate genera rezultate fals pozitive. O serie de afecțiuni, altele decât sarcina, inclusiv boala trofoblastică și anumite neoplasme non-trofoblastice cum ar fi tumorile testiculare, cancerul de prostată, cancerul de sân și cancerul pulmonar, pot cauza niveluri crescute de hCG.1-2 Prin urmare, prezența hCG-ului numai în urină nu ar trebui folosită pentru a diagnostica sarcina, cu excepția cazului în care aceste afecțiuni au fost excluse.

4. Acest test poate produce rezultate fals negative. Pot apărea rezultate fals negative atunci când nivelurile de hCG sunt sub nivelul de sensibilitate al testului. Când încă se suspectează sarcina, o primă probă de urină de dimineață trebuie recoltată 48 de ore mai târziu și testată. În cazul în care se suspectează sarcina și testul continuă să producă rezultate negative, consultați un medic pentru un diagnostic suplimentar.
5. Acest test oferă un diagnostic prezumtiv pentru sarcină. Un diagnostic de sarcină confirmat trebuie pus de către un medic numai după ce au fost evaluate toate constatările clinice și de laborator.
6. Urina colorată neobișnuit (de exemplu, roșu, maro) poate provoca rezultate inexacte.

ERORI DE TESTARE



S-a produs o eroare în timpul testului. Motivele pot fi:

- Buza de absorbție nu a rămas orientată în jos în timpul aplicării urinei.
- S-a aplicat prea puțină urină.
- Nu s-au respectat alte instrucțiuni de utilizare.



Testul nu a decurs conform așteptărilor. Motivele pot fi:

- Proba de urină a fost prea mică pentru a începe testul.
- Testul a depășit data de expirare.
- Nu s-au respectat alte instrucțiuni de utilizare.

Pentru ambele erori de mai sus, ar trebui să efectuezi un nou test, urmând cu atenție instrucțiunile.

ELIMINAREA TESTULUI

Testul conține baterii; îndepărtează bateriile înainte de a elimina testul. Eliminarea bateriilor trebuie să fie conform schemei de reciclare adecvate. Pentru a le îndepărta, introdu o monedă în fanta de la capăt și răsucesce pentru a deschide spatele testului.

Atenție: Nu dezasambla, nu reîncărca și nu arunca bateriile în foc. Elimină restul testului conform schemei de reciclare adecvate pentru echipamente electrice. Nu arunca echipamente electrice în foc.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Cât de precis este Testul de Sarcină Rapid Digital hCG Advent Life?

A fost efectuată o evaluare clinică a 142 de probe de urină, iar rezultatele obținute prin testul de sarcină au fost comparate cu un alt test hCG de urină disponibil comercial. Precizia generală este de > 99%.

2. Cum funcționează testul?

Când sunteți însărcinată, corpul dumneavoastră produce hormonul de sarcină hCG (gonadotropină corionică umană), a cărui cantitate crește în stadiul incipient al sarcinii. Testul digital de sarcină hCG poate detecta hormonul în urină la niveluri chiar și de 25 mIU/mL.

3. Cât de curând după ce suspectez că sunt însărcinată pot face testul?

Puteți să vă testați urina chiar din prima zi de întârziere a menstruației. Testul poate fi făcut în orice moment al zilei. Dacă sunteți însărcinată, prima urină de dimineață conține cea mai mare concentrație de hormon de sarcină.

4. Este necesar să folosesc prima urină de dimineață pentru testare?

Deși puteți efectua testul în orice moment al zilei, prima urină de dimineață este de obicei cea mai concentrată. Utilizarea urinei de dimineață pentru test poate oferi un rezultat mai precis.

5. Cât de sensibil este testul?

Testul de sarcină digital hCG detectează hCG în urină la un nivel de 25 mIU/mL sau mai mare. Adăugarea de LH (300 mIU/mL), FSH (1.000 mIU/mL) și TSH (1.000 μIU/mL) la probele negative (0 mIU/mL hCG) și pozitive (25 mIU/mL hCG) nu a arătat nicio interferență din partea acestor substanțe asupra rezultatelor testelor.

Ce ar trebui să fac dacă rezultatul arată că sunt gravidă - "YES+"?

Este posibil să fii gravidă. Consultă medicul pentru a confirma rezultatul și a primi sfaturi.

Ce ar trebui să fac dacă rezultatul arată că nu sunt gravidă - "NO-"?

Este posibil să nu fii gravidă sau nivelul hormonului de sarcină să nu fie suficient de ridicat pentru a fi detectat. Dacă nu îți vine menstruația în decurs de o săptămână de la data estimată, repetă testul cu un nou dispozitiv de testare. Dacă primești același rezultat după repetarea testului și tot nu îți vine menstruația, ar trebui să consulți medicul.

Pe ecran apare simbolul "?". Ce înseamnă?

Simbolul "?" indică faptul că a apărut o eroare în timpul testului. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să repetați testul cu un test nou. Consultați secțiunea "Erori de testare".

9. Am folosit testul, dar nu a apărut niciun rezultat pe display. Ce înseamnă aceasta?

Dacă nu apare niciun rezultat, te rugăm să vezi secțiunea Erori de testare.

BIBLIOGRAFIE

1. Dawood MY, BB Saxena, R Landesman Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma, Obstet. Gynecol. 977; 50(2): 172-181
2. Braunstein GD, JL Vaitukaitis, PP Carbone, GT Ross Ectopic production of human chorionic gonadotropin by neoplasms", Ann. Intern Med. 1973; 78(1): 36-45

INDEX DE SIMBOLURI

- Numai pentru diagnostic in vitro
- Depozitare și transport între 2-30° C
- Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
- Producător
- Teste per kit
- Data de expirare
- Număr de Lot
- Consultați instrucțiunile de utilizare
- Reprezentant autorizat
- A nu se reutiliza
- Număr de catalog
- Depozitare și Transport ≤90% UM.
- Reciclare: echipament electronic
- Materiale reciclabile

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550 Yin Hai street, Hangzhou
Economic & Technological Development Area, Hangzhou,
310018 P.R. China
Email: info@alltests.com.cn
Web: www.alltests.com.cn

MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany

Importer: Advent life OOD

11 G. Benkovski str. Sofia, Bulgaria
tel.: +35928105480,
www.adventlife.net

Distributor:

S.C. Viva Care S.R.L.

Str. Păsărani, nr. 4, Sector 2,
București.
E-mail: office@vivacare.ro,
Telefon: +40730647647,
www.vivacare.ro

