

narivent®

Spray Nazal Antiedematos

RO

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de folosirea produsului.

1. Ce este NARIVENT® Spray Nazal Antiedematos și pentru ce se utilizează


NARIVENT® Spray Nazal Antiedematos este un dispozitiv medical cu acțiune osmotică, cu efect antiedematos, care inhibă procesul evolutiv al inflamației și este indicat:

- pentru reducerea obstrucției nazale la pacienții cu hipertrofie de cornete nazale, la pacienții cu rinită alergică sau rinită vasomotorie;
- pentru tratamentul edemelor asociate stărilor inflamatorii rinosinusale și rinoadenoiditelor acute și cronice;
- pentru tratamentul și profilaxia recidivelor post-chirurgicale ale polipozei nazale;
- pentru tratamentul pre și post-chirurgical al patologiei rinosinusale.

2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza NARIVENT® Spray Nazal Antiedematos

Nu folosiți produsul dacă aveți cunoștință de hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului (prezentate la punctul 6).

3. Cum să utilizați NARIVENT® Spray Nazal Antiedematos

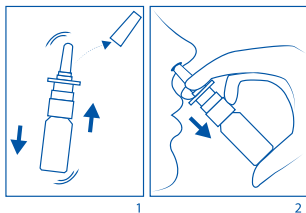

- Scoateți capacul de protecție (figura 1), așezați degetul mare la baza flaconului, arătătorul și degetul mijlociu pe aripioarele dozatorului și apăsați în jos. Apoi eliberați-le. Repetați această acțiune până la obținerea primului puf. Aplecați ușor capul în față și administrați produsul în nări fără a respira în timpul aplicării (figura 2).

- Adulți și copii: se recomandă două puf-uri pentru fiecare nară, de două ori pe zi sau în funcție de recomandarea medicului.

4. Atenționări

- Mecanismul specific de acțiune al produsului poate provoca, în timpul primelor administrări, rinoree osmotică temporară după administrare, asociată cu o senzație ușoară de mâncărime nazală și să determine un strănut ușor.
- În cazul administrării pre-chirurgicale, asigurați-vă că nu există nici o hipersensibilitate sau intoleranță cunoscute la produs.
- În cazul reacțiilor adverse, opriți tratamentul și consultați medicul.
- Evitați contactul cu ochii.
- Nu folosiți acest produs dacă ambalajul original nu este intact sau dacă există dovezi de alterare (de exemplu, dacă este reetichetat). Modificarea și/sau alterarea integrității ambalajului ar putea compromite cerințele de siguranță ale produsului.
- Nu utilizați niciodată produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- Evitați utilizarea promiscuă a produsului.
- Nu ingerați produsul.
- Nu aruncați flaconul în mediu după folosire.

5. Cum se depozitează NARIVENT® Spray Nazal Antiedematos

- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
- Închideți bine capacul flaconului după folosire.
- A nu se depozita la temperaturi de peste 30° C.

6. Alte informații

Compoziție: Manitol, glicirizinat dipotasic, glicerol, copolimer PEG / PPG, sare disodică EDTA, sodiu N-hidroxitimetil glicinat, polisorbitat 20, sorbat de potasiu, hidrat de sodiu, apă purificată, arome naturale.

Ambalaj
flacon 20 ml

Importator:

S.C. 3F Plantamed S.R.L.,
Calea Victoriei 103-105, Sector 1, București
Tel: 021 316 8931, Fax: 021 312 9580
www.3fplantamed.ro



PlantaMed

Produs destinat pieței din România.

PRODUS ÎN ITALIA



DMG Italia srl

via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com



20FG987 5-04/10/2019

Revizua nr. 09/2019