

## **Separator pentru degete ORIONE G100**

Realizat dintr-un amestec de polimeri si ulei mineral. Uleiul mineral se elibereaza treptat din structura polimerului, rehidratand pielea. Reduce socul in caz de impact, presiune sau vibratie la nivelul piciorului. Gelul din care este fabricat, este netoxic, hipoalergenic, lavabil si reutilizabil.

**Indicatii:** previne suprapunerea degetelor reducand procesul de frecare. Sunt ideale pentru degete deformate si pentru recuperare post-operatorie.

**Compozitie:** gel polimerizat. Nu utilizati pe rana deschisa. Indepartati dispozitivul macar 4 ore pe zi pentru a lasa pielea sa respire. In caz de iritatie, discomfort, sau circulatie deficitara a sangelui la nivelul degetelor opriti utilizarea.

Nu pastrati produsul in apropierea surselor de caldura. A nu se lasa la indemana copiilor.

**Producator:** Safta SPA, Italia

**Importator si distribuitor:** CORIS CONSTRUCT SRL, Divizia Medical Farm,  
B-dul.1 Decembrie 1918, nr.13, Rosu, Ilfov, tel: 021.222.2002, [www.tehnico-medical.ro](http://www.tehnico-medical.ro)