



CE ESTE MARIMER CURĂȚAREA NASULUI ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ?

INDICAȚII

În caz de infecție a căilor respiratorii superioare: răceală, sinuzită sau rinită alergică. În caz de condiții de mediu iritante: aer rece, uscat sau umed.

PERFORMANȚE

Curățare nazală:

- Curățarea mucoasei nazale
- Facilitează evacuarea secrețiilor nazale
- Elimină impuritățile.

BENEFICII

Ameliorarea simptomelor nazale, în caz de:

- nas înfundat,
- nas uscat,
- secreții nazale abundente,
- mâncărime.

Îmbunătățirea calității vieții: confort respirator și calitatea somnului.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA MARIMER CURĂȚAREA NASULUI?

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la apa de mare.

Nu utilizați la nou-născuții prematuri.

ATENȚIONĂRI

UZ EXTERN. A NU SE INJECTA. A NU SE ÎNGHIȚI. DE UNICĂ FOLOSINȚĂ.

Nu utilizați o unidoză deteriorată (scurgere de lichid, deformare etc.) sau o unidoză deja deschisă, din cauza riscului de contaminare bacteriană rapidă. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către producător

- contact: www.labogilbert.fr și/sau Autoritatea națională competentă.

CUM SE UTILIZEAZĂ MARIMER CURĂȚAREA NASULUI? INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Posologie: 1 până la 6 spălări pe zi la nevoie sau până la dispariția simptomelor.

Utilizare: Spălarea trebuie efectuată de un adult.

· Înclinați capul într-o parte pentru a evita riscul de aspirație. Se recomandă ca bebelușul sub 6 luni să stea culcat. Dacă o singură persoană efectuează spălarea nazală, pentru a evita rănirea bebelușului cu vârful unidozei, îl puteți imobiliza înfășurându-l într-un prosop.

- Introduceți ușor vârful unidozei în nara superioară și apăsați ușor pe unidoză. În același timp, închideți gura, astfel încât soluția să iasă prin cealaltă nară împreună cu secrețiile nazale.
 - Lăsați mucozitățile să se scurgă.
 - La bebeluși:
 - Dacă nasul nu este bine curățat, repetați pașii pentru cealaltă nară, culcând bebelușul pe cealaltă parte și ștergându-i nasul cu un șervețel de hârtie de unică folosință.
 - Dacă nasul este suficient curățat după spălarea unei nări, nu este nevoie să repetați spălarea celeilalte nări. În acest caz, începeți cu cealaltă nară la următoarea curățare.
 - În cazul copiilor mici: rugați-i să sufle nasul și repetați pașii pentru cealaltă nară.
- Precauții de utilizare: În cazul bebelușilor, administrați produsul cu presiune minimă, pentru a evita orice risc de contaminare a urechii medii.

CUM SE PĂSTREAZĂ MARIMER CURĂȚAREA NASULUI?

Nu folosiți după data de expirare indicată pe unidoză. A se feri de lumină. A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂNA COPIILOR.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mod de prezentare : Unidoze de 5 ml.

Compoziție: Apă de mare, apă purificată (echivalent a 9 g/l săruri).

Laboratoires Gilbert

928, Avenue du Général de Gaulle - F-14200 Hérouville Saint-Clair

