

Kid-Man® Manusi examinare

Scopul prevazut :

i Instrucțiuni de utilizare



Aceste instrucțiuni de utilizare TREBUIE înmânate utilizatorului produsului. ÎNAINTE de a utiliza acest produs, aceste instrucțiuni de utilizare TREBUIE citite și păstrate pentru referințe ulterioare.



Proceduri medicale



Curatenie



Manipulare alimente

INTRODUCERE

- ▶ Instrucțiunile de mai jos trebuie utilizate împreună cu informațiile detaliate de pe ambalaj
- ▶ Mănuși de examinare și protecție de unică folosință, fabricate din nitril; fără pudră; nesterile. Atenție: Atenție: Potrivit pentru contactul cu alimentele (timp de contact maxim 30 de minute și temperatură de contact de 40 de grade). Fără latex, fără pudră și fără DEHP/DOP. Conform cu Regulamentul MD (UE) 2017/745 (Clasa 1), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, Regulamentul EIP (UE) 2016/425 (CAT III), EN ISO 21420:2020 și EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016.
Verificați dacă există deteriorări înainte de utilizare. Nu utilizați mănuși deteriorate.
- ▶ Îmbrăcarea și scoaterea corectă a mănușilor este o abilitate care trebuie exersată de către lucrătorii din domeniul sănătății și de către alte persoane care utilizează mănuși. Îmbrăcarea trebuie efectuată în ordinea corectă pentru a preveni transmiterea infecțiilor. Păstrați mâinile curate înainte de a îmbrăca mănușile. Când vă scoateți mănușile, evitați ca suprafața exterioră a mănușilor să intre în contact cu pielea, deoarece suprafața ar fi putut fi contaminată cu sânge și alte fluide corporale. Evitați ruperea, deoarece acest lucru poate face ca contaminanții să vă stropească ochii sau gura sau să vă atingă pielea sau pe alte persoane din apropiere.

COMPONENTE /COMPONENTE PERICULOASE

Componentele utilizate în fabricarea mănușilor pot provoca reacții alergice la unele persoane. Unele mănuși pot conține componente despre care se știe că pot cauza alergii pentru persoanele alergice la acestea, care pot dezvolta iritații de contact și/sau reacții alergice. În caz de reacție alergică, consultați un medic.

ETICHETE

Mănușile sunt din categoria III, Echipament individual de protecție, conform anexei I la Regulamentul 2016/425 și respectă standardele: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.

- ▶ Fiecare unitate afișează următoarele informații: referința produsului, numărul lotului și data de expirare
- ▶ Simboluri utilizate în conformitate cu standardul EN ISO 15223: Simboluri care trebuie utilizate pentru etichetele dispozitivelor medicale, etichetarea și informațiile care trebuie furnizate.

Organismul notificat responsabil pentru certificare și conformitate continuă: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda

CE 2777



EN ISO 374-5:2016
Protects against viruses

Rezistență la bacterii și fungi - trece. Rezistență la virus - trece. *Rezistența

la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă doar la specimenul testat

ELEMENTE CHEIE

- ▶ Mănușă subțire din nitril fără pudră, ambidextră și cu margine rulată pentru o rezistență sporită a manșetei
- ▶ Proprietăți bune de barieră virală, protejează împotriva unei varietăți de substanțe chimice
- ▶ Sensibilitate tactilă excelentă, priză îmbunătățită pe suprafețe umede și uscate, cu vârfuri deget microtexturate
- ▶ Potrivire excelentă, ușor de pus și de îndepărtat
- ▶ Fără latex, pudră și proteine, o alternativă bună pentru cei care suferă de alergii de tip I
- ▶ Mănușile sunt potrivite pentru toate tipurile de contact cu alimentele

MEDICAL	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5

▶ 100 pcs cutie


▶ 10 cutii pe bax

▶ 1080 cutii pe palet


INFORMATII DE BAZA

Marime	Latime palma	Lungime totala	Grosime		
			Palma	Manseta	Deget
XS 5-6	75 ± 5 mm	240 mm	Min 0,08 mm	Min 0,07 mm	Min 0,10 mm
S 6-7	85 ± 5 mm				
M 7-8	95 ± 5 mm				
L 8-9	110 ± 5 mm				
XL 9-10	120 ± 5 mm				
XXL 10-11	130 ± 5 mm				

CUM SA PUI CORECT MANUSILE DE UNICA FLOSINTA

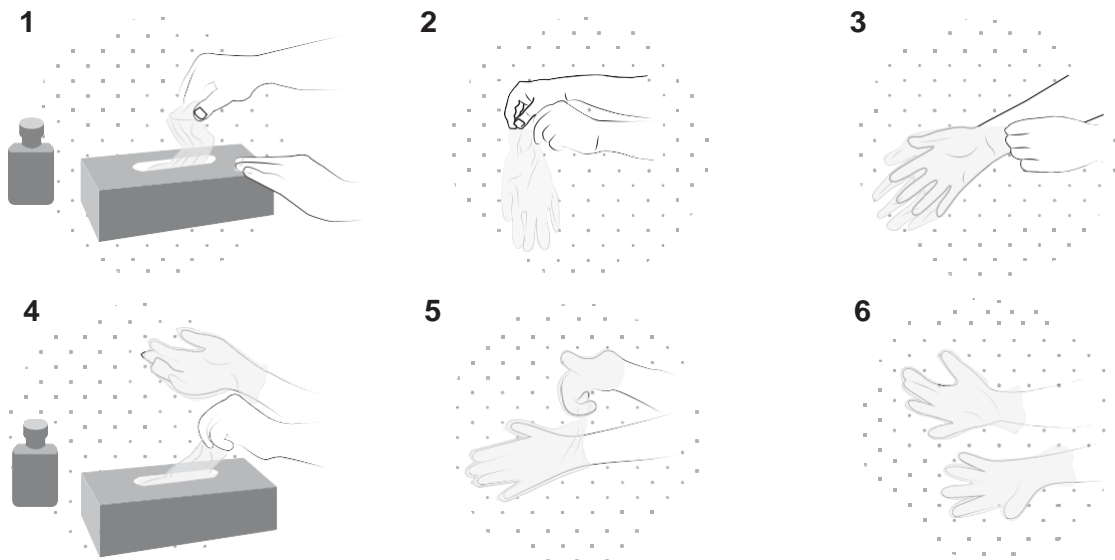

CUM SA DAI JOS CORECT MANUSILE DE UNICA FOLOSINTA

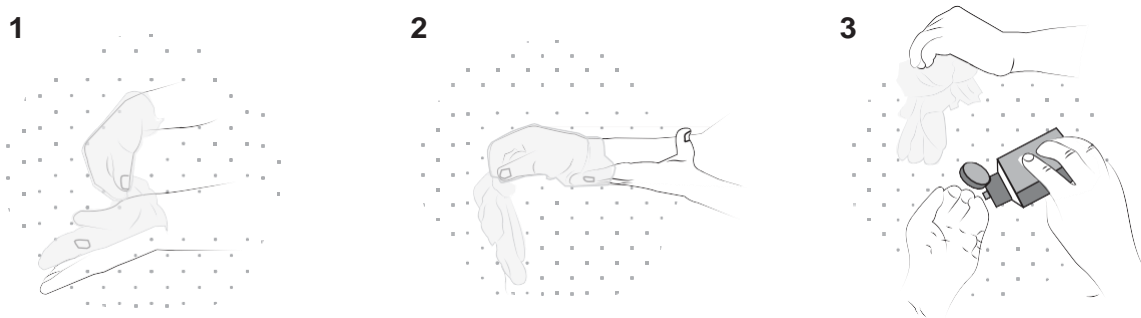

INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE

Do not expose to direct sunlight, ozone sources or sources of fire. Store in a dry and cool place, at a temperature of 5-38°C. Do not keep in direct vicinity of solvents, oils, fuels and lubricants.

ELIMINARE



Eliminați în conformitate cu reglementările în vigoare.

SIMBOLURI FOLOSITE PE PACHET

	Producator		Data productie		Temperatura		Consult instructions for use
	Lot / numar serie		Data exp		De unica folosinta		Recycling packaging
	PNumar produs		Mentine uscat		Non-sterile		This side up
	Medical device		Mentine la distanta de soare		Potrivit pentru contact cu alimente		Handle with care
	Numae serie						

UAB Kasko Group | Kid-Man®
 A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Lithuania
 www.kid-man.com | info@kid-man.com
 Tel. +370 5 265 0000

Importator / Distributor in Romania : Kid-Man Aid SRL
 Strada Theodor Aman Nr 2-2A, Braila Tel: +40 753 660066

Made in China
 Designed by Kid-Man®

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

Date of last update 2024-05-02

