

Plasturi anti-acnee cu Hidrocoloid, in forma de inima, 12 buc

- Protejează pielea împotriva factorilor externi iritanți
- Ajută la tratarea imperfecțiunilor existente
- Absoarbe impuritățile pentru o vindecare mai rapidă

După doar o singură utilizare, leziunea devine mai puțin roșie, mai puțin dureroasă și semnificativ mai puțin deranjantă.

Realizate din material hidrocoloidal cu capacitate ridicată de absorbție, aceste patch-uri în formă de inimă protejează imperfecțiunile de murdărie, previn atingerea sau stoarcerea acestora, mențin zona curată și absorb impuritățile pentru o refacere mai rapidă. **MOD DE UTILIZARE :** 1. Curățați și uscați pielea. 2. Îndepărtați patch-ul prin ruperea foliei perforate de pe spate. 3. Aplicați patch-ul pe zona dorită și apăsați ușor timp de 2–3 secunde. Poate fi purtat peste noapte sau în timpul zilei. 4. Îndepărtați ușor patch-ul de la margine după ce acesta devine alb. Pentru rezultate optime, purtați patch-ul aproximativ 4–8 ore. **PRECAUȚII:** Întrerupeți utilizarea și consultați un medic dacă pielea devine roșie, umflată sau apare mâncărime în timpul utilizării sau dacă simptomele persistă după utilizare. 2. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți cu apă. 3. Nu utilizați pe pielea sensibilă la plasturi, benzi adezive sau măști peel-off. 4. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate ori scăzute. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. 5. Închideți ferm sistemul de tip zipper al ambalajului pentru a păstra patch-urile rămase după utilizare. Fabricat în Korea. Producator: Adwin Korea Corp. Importator: Zenith Group SRL, Bucuresti, sect.5, Str. Recrutului nr. 4, Tel: 0729006755; Ingrediente cf. INCI marcate pe ambalaj . A se folosi preferabil, înainte de 07.2028.