

KAdermin

spray cu pulbere

SCX TECHNOLOGY

SPRAY CU PULBERE

Vindecarea
Rănilor

50 ml

KAdermin

SPRAY CU PULBERE

KADERMIN SPRAY CU PULBERE este considerat „dispozitiv medical”. Formularea de tip spray cu pulbere creează o barieră protectoare, fiind un adjuvant în tratamentul plăgilor, ulcerărilor, abraziunilor, arsurilor minore, leziunilor cutanate exudative, iritațiilor de scutec, macerării pielii determinate de transpirație, precum și al leziunilor traumatiche superficiale. **KADERMIN SPRAY CU PULBERE** este indicat în tratamentul plăgilor postoperatorii, precum și al bonturilor de cordoan ombilical restante după sectionare. **KADERMIN SPRAY CU PULBERE** formează o peliculă de protecție împotriva agresiunilor microbiene, care ajută la accelerarea procesului de vindecare. Efectul de barieră de protecție este dat de asocierea caolinului cu acidul hialuronic; caolinul absorbă exsudatul în exces generat de plagă, în timp ce acidul hialuronic stimulează hidratarea țesuturilor. Datorită proprietăților antimicrobiene ale complexului brevetat SCX (dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), bariera creată de caolin și acidul hialuronic.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de utilizare, curățați pielea cu ser fiziologic, apoi uscați-o cu grijă. 2. Agitați bine înainte de utilizare. 3. Aplicați un strat subțire de pulbere doar pe suprafața afectată, de la o distanță de 10 cm. 4. Nu masați; pulberea trebuie să formeze un strat protector continuu. 5. Schimbați pansamentul o dată sau de mai multe ori pe zi. În cazul tratamentului iritațiilor de scutec sau eritemului submamar, arsurilor și leziunilor traumatiche superficiale: repetați aplicarea la fiecare 48 de ore, în cazurile în care există leziuni care trebuie tratate de personal medical. 6. În cazul leziunilor deschise, aplicați o compresă umedă ca pansament secundar, apoi un bandaj steril pentru a-i acoperi.

ATENȚIONĂRI

- Excluziv pentru uz extern; a nu se ingera.
- Evitați contactul cu ochii; în caz de contact, clătiți imediat cu apă.
- A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- A nu se steriliza.

TEHNOLOGIA SCX

VINDECAREA RĂNILOR

- După utilizare, aplicați capacul cu atenție.
- A nu se utiliza după data de expirare.

- Întrerupeți tratamentul dacă apar reacții cutanate anormale; informați medicul dumneavoastră și producătorul.

• Pentru aplicare nu este nevoie de personal medical.

CONTRAINDICAȚII

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj și nici interacțiuni cu alte medicamente și substanțe medicale. Nu s-au raportat fenomene de sensibilizare alergică, însă s-a raportat prezența dioxidului de aluminiu (Al₂O₃). Nu utilizați în caz de

hipersensibilitate cunoscută la componente. Se recomandă utilizarea în timpul sarcinii și pe perioada

alăptării numai sub supravegherea unui medic.

Compoziție:

SCX (dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, siliciu, hialuronat de sodiu. Agent propulsor: amestec de butan-propan.

Precauții pentru utilizare: Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălțit. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi mai mici de 5° C sau mai mari de 50° C. Nu perforați și nu ardeți, nici chiar după utilizare. A se utiliza numai în scopurile indicate. Nu îndreptați jetul pulverizat spre ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flăcări deschise sau alte surse de aprindere. A se utiliza numai în spații deschise. În caz de ingestie sau pulverizare în ochi, solicitați imediat asistență medicală calificată sau contactați un centru toxicologic și furnizați-le informațiile despre produs menționate



LOT: A se vedea partea inferioară a tubului

75 3 E
UZ EXTERN

Volum net – tub de 50 ml
Rev. 2 dated 15/10/2019

Dispozitiv medical clasa II B



1370

PAVIA FARMACEUTICI s.r.l.
Via Vistarino 14/F
27010 Copiano (PV) ITALY
Reprezentant unic în România:
MBA PHARMA INNOVATION
Calea Moșilor nr. 158, etaj 6,
birou 7, sector 2, București

