



Dermosept⁺
HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

Dermosept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor este destinat curățării, hidratării și debridării rănilor. Pentru managementul abraziunilor cutanate minore, lacerărilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pentru pielea intactă - previne infecțiile. Poate fi folosit și pentru hidratarea și desprinderea pansamentelor uscate.

Dermosept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor este un hidrogel topic formulat ca spray ușor de folosit, principalul său mecanism de acțiune fiind modificarea condițiilor de la nivelul plăgii prin îndepărtarea mecanică a corpilor străini pentru a preveni iritațiile, infecțiile și inflamația asociate și asigurarea unui mediu local optim din punct de vedere al umidității, oxigenului și pH-ului, favorizând astfel procesul de vindecare. Hidrogelul creează un film protector aderent la rană, care previne infecțiile și inflamația asociată.

Dermosept⁺
HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR



**CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE
PREVINE INFECȚIILE**

Dermosept⁺
HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

Compoziție: Fiecare flacon de Dermosept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor conține:
♦ **Acid hipocloros 0,016%**
♦ **Excipienți:** Apă ionizată, clorură de sodiu, fosfat monosodic și fluorosilicat de sodiu și magneziu gel.

Mod de utilizare: Aplicați Dermosept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor singur sau după Dermosept Soluție pentru a curăța plaga, îndepărtând astfel corpii străini, pentru a hidrata, debrida și preveni infecțiile. Aplicați în funcție de necesități, pentru a crea condiții optime pentru vindecarea rănilor. Nu este necesară clătirea.

Păstrare: Dermosept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor se păstrează la temperatura camerei, la maximum 25°C, departe de surse directe de căldură și lumină.
A nu se păstra la temperaturi sub 4°C.
A nu se transfera în alt recipient.
A se închide capacul după fiecare utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dermosept⁺
HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR



**CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE
PREVINE INFECȚIILE**

Verificați partea inferioară a cutiei pentru numărul lotului și data expirării.

Cf Pharma Ireland Ltd
Unit 73B, Hebron Industrial Estate
Kilkenny, Irlanda

Distribuit de:
Terapia SA, Str. Fabricii Nr. 124,
Cluj-Napoca, România



FĂRĂ ALCOOL • 0+ LUNI

**CURĂȚĂ
PROTEJEAZĂ
PREVINE
INFECȚIILE**

Non-silant
Non-sterilizat
Non-toxic
Testat din punct de vedere dermatologic

Non-sterilizat
Non-sterilizat
Fără alcool
Hidratant

Dispozitiv medical **CE** 0426

4°C 25°C

5 944702 209635

e 150ml

FĂRĂ ALCOOL • 0+ LUNI

**CURĂȚĂ
PROTEJEAZĂ
PREVINE
INFECȚIILE**

Non-silant
Non-sterilizat
Non-toxic
Testat din punct de vedere dermatologic

Non-sterilizat
Non-sterilizat
Fără alcool
Hidratant

