




CMYK



SHTANTZA

Dermostept⁺

HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

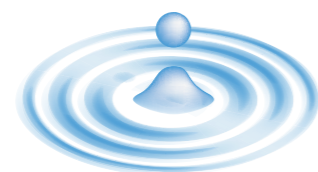

Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor este destinat curățării, clătirii și hidratării rănilor. Pentru managementul abraziunilor cutanate minore, lăcerățiilor minore, iritațiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pentru pielea intactă - previne infectarea rănilor.

1. Identificare, compoziție și utilizare

Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor este un gel sub formă de spray, electrolizat și oxidant, pe bază de apă, ușor de utilizat, ce conține acid hipocloros și este testat dermatologic. Utilizări:

- ♦ Curățarea, hidratarea și debridarea rănilor
- ♦ Prevenirea infectării rănilor
- ♦ Managementul abraziunilor cutanate minore, lăcerățiilor minore, iritațiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pielii iritate și dureroase și pentru pielea intactă.
- ♦ Poate fi utilizată pentru hidratarea răni și crustelor, precum și pentru hidratarea și desprinderea pansamentelor uscate.
- ♦ Eliminarea agenților iritanți asociați cu mirosurile neplăcute ale plăgilor.

1.1 Mecanism de acțiune

Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor este un gel sub formă de spray, pe bază de apă, modificat electrochimic, ce conține acid hipocloros. Mecanismul său de acțiune constă în modificarea condițiilor de la nivelul răni prin îndepărtarea mecanică a corpilor străini ce pot cauza iritații și infecții și asigurarea unui mediu local optim din punct de vedere al umidității, oxigenului și pH-ului, favorizând astfel procesul de vindecare. Hidrogelul creează o peliculă care asigură acoperirea și aderența la rană și previne infecția și inflamația asociate. Nu este toxic și nu provoacă iritații sau reacții alergice.

1.2 Compoziție

Fiecare flacon Dermostept pentru îngrijirea rănilor conține:

- ♦ Acid hipocloros 0,016%
- ♦ Excipienți: Apă ionizată, clorură de sodiu, fluorosilicat de sodiu și magneziu gel, fosfat monosodic.

2. Ambalaj

Dispozitivul medical este disponibil în următoarele variante:
Flacoane de 150 ml și 250 ml cu pulverizare prin spray.

3. Doze și mod de utilizare

Aplicați Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor singur sau după Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor pe zona afectată pentru a curăța plaga, îndepărtând astfel orice corpi străini, pentru hidratare și prevenirea infecțiilor. Aplicați în funcție de necesități, pentru a crea condiții optime pentru vindecarea plăgii. Nu este nevoie să clătiți.

4. Reacții adverse

În cazuri rare, poate apărea o senzație ușoară de usturime.

5. Interacțiuni

Nu se cunosc interacțiuni.

6. Păstrare

Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor se păstrează la temperatura camerei, la maximum 25°C, departe de surse directe de căldură și lumină. A nu se păstra la temperaturi sub 4°C. A nu se transfera în alt recipient. A se închide capacul după fiecare utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

7. Atenționări și precauții

Nu utilizați Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor în caz de hipersensibilitate cunoscută sau

intoleranță la oricare dintre substanțe. Contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți întrebări. A nu se ingera Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor. Potrivit pentru utilizare încă de la naștere. Pentru utilizare în timpul sarcinii și alăptării, consultați în prealabil medicul dumneavoastră sau farmacistul. Dispozitivul medical nu conține alcool.

Pentru un efect optim, lăsați hidrogelul să se usuce natural. Exclusiv pentru uz extern. A nu se utiliza mai mult de 30 de zile. Utilizarea concomitentă cu alte medicamente trebuie efectuată doar la recomandarea unui profesionist din domeniul sănătății.

8. Data expirării

A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj. Data expirării se aplică dispozitivului Dermostept în recipientul său intact, dacă este păstrat corespunzător.

9. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. Nu aruncați Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor sau ambalajul acestuia în mediul înconjurător.

Ultima revizuire: Aprilie 2025



Cf Pharma Ireland Ltd
Unit 73B, Hebron Industrial Estate
Kilkenny, Irlanda

Distribuit de:
Terapia SA, Str. Fabricii Nr. 124,
Cluj-Napoca, România

Dispozitiv medical 0426




SUN
PHARMA

Terapia
a SUN PHARMA company

Dermostept⁺

HIDROGEL PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

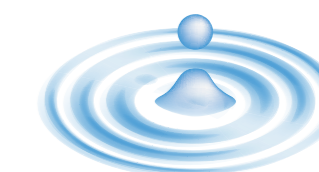

PICS56-00