



**Dermosept<sup>+</sup>**  
SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

**Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor** este destinată curățării, clătirii, hidratării și debridării rănilor. Pentru managementul abraziunilor cutanate minore, lăcerățiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pentru pielea intactă – previne infectarea rănilor. Poate fi folosită pentru hidratarea și desprinderea pansamentelor uscate.

**Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor** este o soluție topică formulată ca spray ușor de folosit, principalul său mecanism de acțiune fiind modificarea condițiilor de la nivelul rănii prin îndepărtarea mecanică a corpiilor străini pentru a preveni iritațiile, infecțiile și inflamația asociate și pentru a asigura un mediu local optim din punct de vedere al umidității, oxigenului și pH-ului, favorizând astfel procesul de vindecare.

**Dermosept<sup>+</sup>**  
SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR



**CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE  
PREVINE INFECȚIILE**

**Dermosept<sup>+</sup>**  
SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

**Compoziție:** Fiecare flacon de Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor conține:  
♦ **Acid hipocloros 0,016%**  
♦ **Excipienți:** Apă ionizată, clorură de sodiu.

**Mod de utilizare:** Aplicați Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor singură sau înainte de folosirea Dermosept Hidrogel, pentru a curăța rana, îndepărtând astfel corpii străini și pentru a hidrata și debrida rana și a preveni infecțiile. Aplicați în funcție de necesități, pentru a crea condiții optime pentru vindecarea rănii. Nu este necesară clătirea.

**Păstrare:** Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor se păstrează la temperatura camerei, la maximum 25°C, departe de surse directe de căldură și lumină.  
A nu se păstra la temperaturi sub 4°C.  
A nu se transfera în alt recipient.  
A se închide capacul după fiecare utilizare.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Dermosept<sup>+</sup>**  
SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR



**CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE  
PREVINE INFECȚIILE**

Verificați partea inferioară a cutiei pentru numărul lotului și data expirării.

Cf Pharma Ireland Ltd  
Unit 73B, Hebron Industrial Estate  
Kilkenny, Irlanda

Distribuit de:  
Terapia SA, Str. Fabricii Nr. 124,  
Cluj-Napoca, România



FĂRĂ ALCOL • 0+ LUNI

**CURĂȚĂ  
PROTEJEAZĂ  
PREVINE  
INFECȚIILE**

Non-iritant  
Non-toxic  
Testat din punct de vedere dermatologic

Non-alergic  
Fără alcool  
Hidratant



Dispozitiv medical CE 0426



e 150ml

FĂRĂ ALCOL • 0+ LUNI

**CURĂȚĂ  
PROTEJEAZĂ  
PREVINE  
INFECȚIILE**

Non-iritant  
Non-toxic  
Testat din punct de vedere dermatologic

Non-alergic  
Fără alcool  
Hidratant

