





CMYK

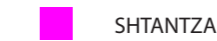

SHTANTZA

# Dermostept<sup>+</sup>

SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

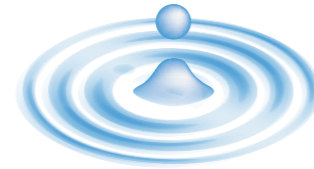

**Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor este destinată curățării, îndepărtării impurităților și hidratării rănilor. Pentru managementul abraziunilor cutanate minore, lăcerățiilor minore, iritațiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pentru pielea intactă - previne infectarea rănilor.**

#### 1. Identificare, compoziție și utilizare

Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor este o soluție sub formă de spray, electrolizată și oxidantă, pe bază de apă, ușor de utilizat, ce conține acid hipocloros și este testată dermatologic. Este indicată pentru:

- Curățarea, hidratarea și debridarea rănilor
- Prevenirea infectării rănilor.
- Managementul abraziunilor cutanate minore, lăcerățiilor minore, iritațiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pielii iritate și dureroase și pentru pielea intactă.
- Poate fi utilizată pentru hidratarea răni și crustelor, precum și pentru hidratarea și desprinderea pansamentelor uscate.
- Eliminarea agenților iritanți asociați cu mirosurile neplăcute ale rănilor.

#### 1.1 Mecanism de acțiune

Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor este o soluție sub formă de spray, pe bază de apă, modificată electrochimic, ce conține acid hipocloros. Mecanismul său de acțiune constă în modificarea condițiilor de la nivelul răni prin îndepărtarea mecanică a corpilor străini ce pot cauza iritații și infecții și asigurarea unui mediu local optim din punct de vedere al umidității, oxigenului și pH-ului, favorizând astfel procesul de vindecare. Nu este toxic și nu provoacă iritații sau reacții alergice.

#### 1.2 Compoziție

Fiecare flacon Dermostept pentru îngrijirea rănilor conține:

- Acid hipocloros 0,016%
- Excipienți: Apă ionizată, clorură de sodiu

#### 2. Ambalaj

Dispozitivul medical este disponibil în următoarele variante:  
Flacoane de 60 ml, 150 ml, 250 ml cu pulverizare prin spray sau flacoane de 500 ml, 1000 ml cu pulverizator tip pompă sau capac cu filet.

#### 3. Doze și mod de utilizare

Aplicați Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor singur sau înainte de Dermostept Hidrogel pentru îngrijirea rănilor pe zona afectată, pentru a curăța plaga, îndepărtând astfel corpii străini, a hidrata și pentru a preveni infecțiile. Aplicați în funcție de necesități, atât cât este necesar pentru a crea condiții optime pentru vindecarea plăgii. Nu este nevoie să clătiți.

#### 4. Reacții adverse

În cazuri rare, poate apărea o senzație ușoară de usturime.

#### 5. Interacțiuni

Nu se cunosc interacțiuni.

#### 6. Păstrare

Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor se păstrează la temperatura camerei, la maximum 25°C, departe de surse directe de căldură și lumină. A nu se păstra la temperaturi sub 4°C. A nu se transfera în alt recipient. A se închide capacul după fiecare utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

#### 7. Atenționări și precauții

Nu utilizați Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor în caz de hipersensibilitate cunoscută sau intoleranță la oricare dintre substanțe. Contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți întrebări. A nu se ingera Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor. Potrivit pentru utilizare încă de la naștere.

Pentru utilizare în timpul sarcinii și alăptării, consultați în prealabil medicul dumneavoastră sau farmacistul. Dispozitivul medical nu conține alcool. Pentru un efect optim, lăsați soluția să se usuce natural. Exclusiv pentru uz extern.

A nu se utiliza mai mult de 30 de zile. Utilizarea concomitentă cu alte medicamente trebuie efectuată doar la recomandarea unui profesionist din domeniul sănătății.


#### 8. Data expirării

A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la Dermostept în recipientul său intact, dacă este păstrat corespunzător.

#### 9. Eliminare

Dispozitivul medical expirat trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor. Nu aruncați Dermostept Soluție pentru îngrijirea rănilor sau ambalajul acestuia în mediul înconjurător.

Ultima revizuire: Aprilie 2025

 Cf Pharma Ireland Ltd  
Unit 73B, Hebron Industrial Estate  
Kilkenny, Irlanda

Distribuit de:  
Terapia SA, Str. Fabricii Nr. 124,  
Cluj-Napoca, România

Dispozitiv medical  0426




  
SUN  
PHARMA

  
a SUN PHARMA company

# Dermostept<sup>+</sup>

SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

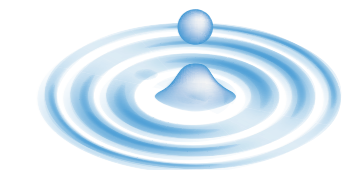

PK2545-100