

Dermosept⁺


SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor este destinată curățării, clătirii, hidratării și debridării rănilor. Pentru managementul abraziunilor cutanate minore, lacerățiilor minore, tăieturilor minore, arsurilor minore, eritemului fesier/dermatitei fesiere și pentru pielea intactă – previne infectarea rănilor. Poate fi folosită pentru hidratarea și desprinderea pansamentelor uscate.

Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor este o soluție topică formulată ca spray ușor de folosit, principalul său mecanism de acțiune fiind modificarea condițiilor de la nivelul rănii prin îndepărtarea mecanică a corpiilor străini pentru a preveni iritațiile, infecțiile și inflamația asociate și pentru a asigura un mediu local optim din punct de vedere al umidității, oxigenului și pH-ului, favorizând astfel procesul de vindecare.

Dermosept⁺

SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

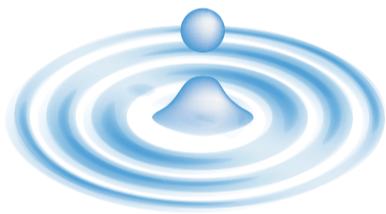

CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE
PREVINE INFECȚIILE

Dermosept⁺

SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR


Compoziție: Fiecare flacon de Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor conține:
+ **Acid hipocloros 0,016%**
+ **Excipienți:** Apă ionizată, clorură de sodiu.

Mod de utilizare: Aplicați Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor singură sau înaintea folosirii Dermosept Hidrogel, pentru a curăța rana, îndepărtând astfel corpii străini și pentru a hidrata și debrida rana și a preveni infecțiile. Aplicați în funcție de necesități, pentru a crea condiții optime pentru vindecarea rănii. Nu este necesară clătirea.

Păstrare: Dermosept Soluție pentru îngrijirea rănilor se păstrează la temperatura camerei, la maximum 25°C, departe de surse directe de căldură și lumină. A nu se păstra la temperaturi sub 4°C. A nu se transfera în alt recipient. A se închide capacul după fiecare utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Dermosept⁺

SOLUȚIE PENTRU ÎNGRIJIREA RĂNILOR

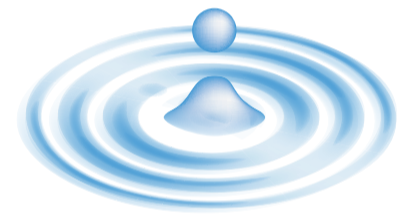

CURĂȚĂ ȘI PROTEJEAZĂ RĂNILE
PREVINE INFECȚIILE

Verificați partea inferioară a cutiei pentru numărul lotului și data expirării.

Cf Pharma Ireland Ltd
Unit 73B, Hebron Industrial Estate
Kilkenny, Irlanda

Distribuit de:
Terapia SA, Str. Fabricii Nr. 124,
Cluj-Napoca, România

Terapia
a SUN PHARMA company

SUN PHARMA

FĂRĂ ALCOOL • 0+ LUNI

CURĂȚĂ
PROTEJEAZĂ
PREVINE
INFECȚIILE



Testat din punct de vedere dermatologic



Hidratant



Dispozitiv medical CE 0426



5 944702 209611

PKCS49-00



Testat din punct de vedere dermatologic



Hidratant

FĂRĂ ALCOOL • 0+ LUNI

CURĂȚĂ
PROTEJEAZĂ
PREVINE
INFECȚIILE

e 250ml

Terapia
a SUN PHARMA company

LOT