

**ACTIONE:**

**RINODEP spray nazal** este un dispozitiv medical recomandat pentru înlăturarea mecanică a alergenilor din cavitățile nazale. Soluția hidrosalină curăță cavitățile nazale și elimină mucusul în exces, facilitând astfel respirația. Polizaharidele asigură confortul și calmarea nasului iritat: datorită efectului de barieră, produsul hidratează și protejează mucoasa nazală.

**Compoziție:**

Apă de mare concentrată, extracte vegetale de: gălbenele, arin negru, coacăz negru, brad argintiu, măceș și perilla; gluconat de mangan.

*Excipienți: apă demineralizată, glicerină, aromă, acid malic, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu.*

**Mod de utilizare:**

1-2 pulverizări în fiecare nară de 3 ori pe zi. Țineți flaconul drept, introduceți vârful în nara contralaterală și apăsați ferm și repede. După pulverizare, inspirați profund cu gura închisă și apăsați cu degetul ușor pe cealaltă nară pentru a distribui produsul uniform pe întreaga mucoasă nazală.

**⚠️ Atenționări:**

A SE AGITA ÎNAINTE DE UTILIZARE. A se închide flaconul cu grijă după fiecare utilizare. A nu se folosi în caz de hipersensibilitate sau alergie la unul sau mai multe componente. Uzul prelungit al produselor topice poate duce la apariția unor fenomene de sensibilizare: în eventualitatea acestor fenomene, a se opri tratamentul și a se consulta medicul. În sarcină, lactație și la copiii sub vîrstă de 2 ani, a se administra produsul la recomandarea medicului. A nu se lăsa la îndemâna și vedere copiilor. A nu se folosi în cazul în care ambalajul este deteriorat. A nu se utilizează după data de expirare.

**⚠️ Condiții de depozitare: 25°C**

A se păstra la loc răcoros, ferit de umiditate și de surse directe de căldură, la temperaturi de sub 25°C. Data de expirare face referire la produsul corect depozitat în ambalaj intact.

**Contraindicații:**

Nu există efecte secundare sau interacțiuni asociate cu utilizarea produsului.

**Mod de prezentare:**

Cutie cu un flacon de 30 ml soluție și prospect.

**Nu conține gluten**

Ultima revizuire: Septembrie 2016



**Erbozeta S.p.A.**  
Strada delle Seriole, 41/43  
47894 Chiesanuova,  
Repubblica San Marino  
[www.erbozeta.com](http://www.erbozeta.com) | [info@erbozeta.com](mailto:info@erbozeta.com)



**Erbozeta Austria GmbH**  
Graben 12, 1010 Vienna (AUSTRIA)

**Distribuitor/notificator în România:**

SC Dr. Phyto SRL  
Str. Opante nr. 36-38,  
sector 2, București, România  
tel/fax +4021 242 7045  
[www.drphyto.ro](http://www.drphyto.ro) / [info@drphyto.ro](mailto:info@drphyto.ro)

