

ISOMAR® OCCHI PLUS - Picături oftalmice pentru OCHI USCAȚI

OSMOPROTECTOR, REHIDRATEAZĂ, ÎMPROSPĂTEAZĂ, CALMEAZĂ ȘI LUBRIFIAZĂ

Flacon Multidoză 10ml

Art.Nr. GA18917

Apă de mare hipotonică de la Cinque Terre - Italia, complexul ISOEYE PLUS® și acid hialuronic.

- Ajută la calmarea simptomelor ochiului uscat
- Fără conservanți
- Poate fi folosit și în timpul purtării lentilelor de contact.

Isomar® Occhi Plus este indicat în mod special pentru tratarea simptomelor ochiului uscat calmând senzația de arsură și iritațiile asociate. Isomar® Occhi Plus cu formula sa specială ajută la reducerea simptomelor ochiului uscat prin intermediul următoarelor acțiuni:

1. Proprietăți osmoprotectoare: una dintre cauzele principale ale uscăciunii oculare este secreția lacrimală anormală având ca și cauză afectarea echilibrului osmotice celular. Isomar® Occhi Plus conține complexul Isoeye Plus® (Propilenglicol, Eritritol, Betaină, L-Carnitină) care exercită o acțiune osmoprotectoare, protejând celulele epiteliale ale corneei de leziuni potențiale cauzate de hiperosmolaritate.
2. Proprietăți hidratante: apa de mare hipotonică, apele florale de Albăstrele (Centaurea cyanus), Gălbenele (Calendula officinalis) și Euphrasia și extractul de Jacobaea maritima favorizează hidratarea suprafeței oculare.
3. Proprietăți lubrifiante: Acidul hialuronic și hipromeloza stabilizează filmul lacrimal ajutând la menținerea unei suprafețe oculare lubrificate și hidratate.

Isomar® Occhi Plus aduce alinare în cazul roșeții, senzației de înțepătură, iritației, mâncărimilor și senzației de corp străin, precum și în cazul lăcrimării și oboselii induse de factori cum ar fi: expunerea la vânt și razele solare, praf, polen, smog, căldură uscată, medii cu aer condiționat, expunerea prelungită la ecranele dispozitivelor digitale, lentile de contact. Isomar® Occhi Plus poate fi utilizat în timpul purtării oricărui tip de lentile de contact. Pentru o mai mare acțiune lubrifiantă și calmantă, este recomandată administrarea Isomar® Occhi înainte de aplicarea lentilelor de contact.

COMPOZIȚIE: Apă purificată, Apă de mare hipotonică (20-26%), extract de Jacobaea maritima (0,01%), Apă de flori de Calendula officinalis (0,10%), Apă de flori de Centaurea cyanus (0,10%), Apă de flori de Helichrysum italicum (0,10%), Apă de flori/frunze/tulpini de Euphrasia officinalis (0,001%), Eritritol (0,15%), Propilenglicol (0,25%) Betaină (0,10%), L-Carnitină (0,15%), Hidroxipropilmetilceluloză (0,25%), Hialuronat de sodiu (0,25%).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Pentru o utilizare corectă a produsului vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

La prima utilizare deschideți ambalajul, îndepărtați sigiliul flaconului și desfaceți dopul;

Înclinați capul și țineți flaconul răsturnat deasupra ochiului;

Coborâți delicat cu un deget pleoapa inferioară și presați gradual flaconul între degete, până când se obține o picătură;

Puneți 1-2 picături în sacul conjunctival, la fiecare 4-5 ore;

Închideți ochiul pentru câteva secunde;

Închideți flaconul imediat după aplicare;

Dacă este necesar, aplicați și la celălalt ochi.

INSTRUCȚIUNI DE DOZARE: 1-2 picături pentru fiecare ochi la fiecare 4-5 ore. Se recomandă alternarea ciclurilor de tratament cu pauze de 7 zile între cicluri. Fiecare ciclu de tratament nu trebuie să depășească 30 de zile.

Dispozitiv Medical Steril.

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C.

Producător: Coswell Spa, Via Gobetti 4, 40050 Funo di Argelato (Bo) ITALY. www.coswell.biz

CONTRAINDICAȚII:

Dispozitivul medical nu este indicat persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele din compoziție.

AVERTISMENTE:

Înainte de utilizare citiți cu atenție informațiile furnizate de producător. Nu depășiți doza recomandată. Întrerupeți tratamentul în caz de apariție a oricărui efect nedorit. Nu utilizați în asociere cu alte tratamente oftalmice. Nu înghițiți. Produsul este destinat exclusiv utilizării oftalmice. A se păstra în interiorul ambalajului, în loc uscat, departe de lumină și de căldură, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 25°C. Nu găuriți și nu deteriorați ambalajul. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deschis sau deteriorat. Nu utilizați după data de expirare. Data de expirare se referă la produsul în ambalajul nedeschis și depozitat în mod corect. Produsul este destinat pacienților adulți. Nu există date specifice referitoare la utilizarea produsului de către copii și femei însărcinate. A nu se lăsa la vedere și la îndemâna copiilor. Se recomandă spălarea cu atenție a mâinilor înainte de a aplica soluția. A nu se atinge cu mâinile vârful flaconului. În timpul administrării soluției, se recomandă să nu se atingă conjunctiva cu vârful flaconului. Soluția trebuie să fie utilizată în termen de 6 luni de la prima deschidere a flaconului. Pentru o conservare corectă se recomandă închiderea cu atenție a flaconului după fiecare utilizare. Nu aruncați flaconul în mediul înconjurător, după utilizare.

În caz de incident grav apărut în legătură cu dispozitivul medical, informați imediat producătorul și Autoritatea Competentă a statului membru în care s-a produs incidentul.