

A-CERUMEN spray

Igiena urechii

CARE ESTE ROLUL CERUMENULUI ?

Cerumenul protejează urechea de infecții, praf și corpi străini, controlează germenii prezenți în mod natural pe suprafața pielii de la nivelul conductului auditiv extern. De asemenea, ajută la lubrifierea timpanului care, în lipsa cerumenului, ar deveni dur, rigid și nu ar mai putea asigura la fel de bine transmiterea sunetului.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ IGIENA URECHII ?

În mod normal, cerumenul se elimină în mod natural din conductul auditiv extern către exterior, datorită mișcărilor de masticație ale maxilarului. Dereglarea acestui proces provoacă acumularea cerumenului. Dopul astfel format alterează buna funcționare a urechii și poate cauza pierderea auzului, zădărnici, vertij ... Utilizarea unei soluții delicate de igienă a urechii contribuie la menținerea conductului auditiv extern curat și previne formarea dopurilor de cerumen.

CE ESTE A-CERUMEN ?

A-CERUMEN este o soluție delicată de igienă a urechii, pe bază de agenți tensioactivi. A-CERUMEN este recomandat copiilor peste 6 luni și adulților:

- folosit regulat, pentru a facilita eliminarea cerumenului și a preveni formarea dopurilor,
- pentru dizolvarea dopurilor de cerumen.

CUM FUNCȚIONEAZĂ A-CERUMEN ?

A-CERUMEN umidifică și apoi dizolvă dopurile de cerumen (cerumen uscat și compact). Odata ce dopul este eliminat, cerumenul va fi secretat din nou pentru a proteja și lubrifia interiorul urechii.

PREZENTARE

40 ml spray

COMPOZIȚIE

Agenți tensio-activi delicăți (acil-sarcozinat de sodiu și ester-sucroză), agent de umectare, colorant de origine naturală, excipienți q.s.ad 100%. Formulă colorată fără conservanți. Formulă colorată de origine naturală.

DOZE

- Pentru igiena regulată a urechii: de 2 ori pe săptămână.
- Pentru eliminarea dopurilor de cerumen: 3-4 zile consecutiv, dimineața și seara.

MOD DE UTILIZARE

1. Înclinați capul pe partea opusă urechii care va fi tratată.
2. Pulverizați de 2 ori în ureche.
3. Lăsați să acționeze aproximativ 1 minut masând baza urechii.
4. Îndreptați capul pentru a lăsa să se scurgă soluția și reziduurile de cerumen, apoi clătiți* și stergeți soluția în exces.

* Clătiți cu ser fiziologic sau apă curată.

ATENȚIONĂRI

Flaconul trebuie folosit în decurs de 3 luni după deschidere.

A nu se păstra la frigider. A se păstra la temperaturi între 10°C și 40°C.

A nu se depăși data de expirare înscrisă pe flacon.

PRECAUȚII DE UTILIZARE

Nu introduceți aplicatorul foarte profund în conductul auditiv pentru a nu produce iritații. A nu se utiliza produsul în caz de perforare a timpanului, otită sau de către purtătorii de dren transtimpanic. În caz de durere la nivelul urechii, consultați medicul. Evitați contactul cu ochii. A nu se înghiți. După fiecare utilizare, scoateți aplicatorul și spălați-l cu apă caldă.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR.

Producător : LABORATOIRES GILBERT, 928 avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, Franța