



Igiena urechii

10 unidoze x 2 ml

Facilitează eliminarea cerumenului și previne formarea dopurilor

A-CERUMEN este indicat copiilor peste 6 luni și adulților pentru utilizare frecventă ca alternativă la bețișoarele de urechi, pentru a facilita eliminarea cerumenului, dizolvarea dopurilor de cerumen și prevenirea formării lor. Forma de ambalare în unidoză permite utilizarea cu ușurință și în siguranță.

Compoziție: Agenți tensioactivi delicăți (acil sarcozinat de sodiu și ester sucroză), agent de umectare, excipienți q.s.ad. 100 %. Formulă colorată de origine naturală și fără conservanți.

Mod de administrare: • Pentru igiena regulată a urechii: de 2 ori pe săptămână. • Pentru dopurile de cerumen: 3-4 zile consecutive, dimineața și seara.

Instrucțiuni de utilizare

1. Înclinați capul pe partea opusă urechii care va fi tratată.
2. Picurați jumătate din conținutul unei unidoze în ureche.
3. Așteptați aproximativ un minut, masând la baza urechii.
4. Îndreptați capul pentru a lăsa să se scurgă produsul și reziduurile de cerumen.
5. Clătiți cu ser fiziologic sau apă curată și stergeți soluția în exces.
6. Picurați cealaltă jumătate din conținutul unidozei în cealaltă ureche dacă este nevoie și repetați pașii 3, 4 și 5.

Precauții de utilizare: A se clăti. Nu introduceți vârful unidozei foarte adânc în conductul auditiv pentru a nu produce iritații.

Contraindicații: A nu se utiliza produsul în caz de perforare a timpanului, otită sau de către persoanele cu tub de dren transtimpanic.

Atenționări: A nu se înghiți. Evitați contactul cu ochii. Nu utilizați o unidoză deteriorată sau deja deschisă din cauza riscului de contaminare bacteriană rapidă. În caz de durere la nivelul urechii, consultați medicul. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătura cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert – website www.labogilbert.fr și/sau către Autoritatea națională competentă. **NU LĂSAȚI LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR !**

Condiții de păstrare: A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe cutie. A nu se păstra la frigider. A se feri de lumină. A se păstra la temperaturi între 10°C și 40°C.

Producător: LABORATOIRES GILBERT, 928 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Franța.

Etichetat și distribuit de: BIESSEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, București.

neinjectabil

Dispozitiv medical