

# MARIMER

## aspirator nazal pentru bebeluși

1 - aplicator nazal / 2- vată\* / 3 – rezervor / 4 – adaptor pentru tub / 5 - tub / 6 - aplicator bucal

\* nu este inclusa

### De ce este importantă folosirea unui aspirator nazal pentru bebeluși?

În primul an de viață, bebelușii respiră doar pe nas și nu stăpânesc tehnica de suflare a nasului. Mucozitățile care blochează nasul bebelușului îi îngreunează respirația. Prin aspirare, veți ajuta bebelușul să elimine aceste mucozități. Fie că doarme, fie că este alăptat, bebelușul va aprecia confortul unei respirații ușoare.

### Înainte de a utiliza aspiratorul nazal pentru prima dată

- Dezasamblați aspiratorul nazal și curățați-l cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă rece.
- Sterilizați la rece sau cu aburi aplicatoarele pe care le veți folosi.

### Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea aspiratorului nazal

1. **Spălați-vă pe mâini.**
2. Asamblați aspiratorul nazal pentru bebeluși Marimer conform schemei.
3. Introduceți puțină vată, cu rol de filtru, între aplicatorul nazal și rezervor.

### Pregătirea bebelușului

1. Așezați bebelușul pe masa de înfășat și ridicați-i capul.
2. Introduceți aplicatorul bucal în gura dumneavoastră. Marginea sa vă permite să țineți piesa între dinți.
3. Introduceți aplicatorul nazal într-una din nările bebelușului.
4. Aspirați ușor. Secrețiile se vor colecta în rezervor.
5. Repetați aspirația de câte ori este nevoie.
6. Repetați operația pentru cealaltă nară.

Instilarea de ser fiziologic sau soluție de apă de mare diluată izotonică în fiecare nară facilitează aspirarea secrețiilor.

### Instrucțiuni de întreținere

- După fiecare utilizare, dezamblați și curățați atent aspiratorul nazal pentru bebeluși cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă.
- Înainte de fiecare utilizare, pentru o igienă cât mai bună, sterilizați la rece sau cu aburi aplicatoarele pe care le veți folosi.

### Atenționări

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aspiratorul nazal pentru bebeluși și aplicatorul sunt în perfectă stare. Înlocuiți aspiratorul nazal și/sau aplicatorul la primele semne de uzură sau deteriorare. A nu se fierbe.

### A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.

**Producator :** Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair – FRANCE.