

## MARIMER IZOTONIC

### Igiena nazala zilnica

**Marimer Izotonic** este un produs natural, soluție fiziologică de apă de mare sterilă și microdifuzată. Bogat în săruri minerale și oligoelemente marine, spray-ul nazal **Marimer Izotonic** este recomandat copiilor și adulților pentru curățarea zilnică a căilor nazale, mai ales în caz de nas uscat sau înfundat.

Sistemul de microdifuziune al **Marimer Izotonic** asigură eliminarea delicată a secrețiilor nazale.

**Marimer Izotonic** poate fi administrat în orice poziție. Buna igienă a nasului favorizează protecția mucoasei nazale împotriva agresiunilor externe (frig, alergii, aer uscat, poluare...) și permite o bună respirație.

#### COMPOZIȚIE

100 % apă de mare diluată sterilă și izotonică.

#### INDICAȚII

**Marimer Izotonic** este recomandat:

- pentru igiena zilnică a căilor nazale,
- pentru hidratarea mucoasei nazale uscate,
- în completarea tratamentelor afecțiunilor ORL.

#### MOD DE ADMINISTRARE

1 pulverizare în fiecare nară de 1-4 ori pe zi, la nevoie.

**Marimer Izotonic** poate fi folosit zilnic pentru o perioadă lungă de timp.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înclinați capul într-o parte.
- Introduceți cu grijă vârful aplicatorului în nara superioară și pulverizați **Marimer Izotonic**.
- Repetați operațiunea pentru cealaltă nară.
- Îndreptați capul pentru a permite mucozităților să se scurgă, apoi ștergeți excesul de soluție sau suflați nasul.

#### PRECAUȚII DE UTILIZARE

Curățați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și uscați.

#### CONDIȚII DE PĂSTRARE

Atenție. Flacon sub presiune: Poate exploda sub efectul căldurii. A se proteja de căldură, scânteii, flăcări deschise, suprafețe fierbinți. Fumatul interzis. A nu se găuri sau arde, chiar după golire. A se proteja de razele soarelui. A nu se expune la temperaturi peste 50°C / 122°F.

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR.**

#### ATENȚIONĂRI:

A nu se utiliza la nou-născuții prematuri.

A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe flacon.

Producator : Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair – FRANCE.