

HYLO COMOD®

Hialuronat de sodiu 1 mg/ml.

Îmbunătățește lubrifierea suprafeței oculare, în cazul unor tulburări condiționate de mediu, precum senzația de uscăciune, de corp străin sau de arsură, dar și după intervenții chirurgicale oftalmologice.

Picături lubrifiante pentru ochi, sterile, fără conservanți și fără fosfați.

Ce este HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® este o soluție sterilă pentru ochi, fără conservanți și fără fosfați.

Compoziție:

1 ml de HYLO COMOD® conține 1 mg hialuronat de sodiu, acid citric anhidru, citrat de sodiu, sorbitol și apă pentru soluții injectabile.

La ce este folosit HYLO COMOD®?

Îmbunătățește lubrifierea suprafeței oculare, în cazul unor tulburări determinate de mediu, precum senzația de uscăciune, de arsură sau de corp străin, dar și după intervenții chirurgicale oftalmologice.

Când se folosește HYLO COMOD®?

Dacă aveți la nivel ocular senzație de mâncărime, arsură sau oboseală ușoară, senzație de nisip în ochi, atunci acestea se pot datora unei lipse de umectare a suprafeței oculare. Dacă, de exemplu, ați stat mai mult timp într-o cameră cu aer condiționat sau după lucrul intens la calculator, filmul lacrimal natural ce acoperă suprafața oculară se degradează mai repede. Pentru ca țesutul ocular să fie funcțional în întregime, el are nevoie să fie lubrifiat tot timpul de un film lacrimal.

Secreția lacrimală fiziologică poate fi redusă din cauza intervențiilor chirurgicale sau după vătămări ale ochiului. Totuși, pentru regenerarea țesutului ocular superficial este necesară o lubrifiere suficientă și continuă. Aplicarea HYLO-COMOD® oferă o prelungită și durabilă umectare a corneei și conjunctivei, astfel încât procesul fiziologic de vindecare să fie susținut în mod eficient.

HYLO COMOD® conține sarea de sodiu a acidului hialuronic, o substanță naturală ce este găsită în ochi, dar și în alte părți ale corpului. Datorită proprietăților sale fiziologice speciale, formează o peliculă umedă uniformă, stabilă și durabilă pe suprafața oculară, care nu este ușor de înlăturat. Oricum, aceasta nu creează vedere încețoșată, ci protejează ochiul dumneavoastră de uscăciune și iritație pe o perioadă îndelungată.

Acest fapt este în mod special important dacă purtați lentile de contact, deoarece lentilele de contact au nevoie să fie scăldate în fluidul lacrimal, pentru a nu produce senzație de disconfort. HYLO COMOD® poate fi folosit în timp ce purtați lentile de contact. Utilizarea lentilelor de contact va fi mult mai confortabilă prin folosirea HYLO COMOD®, pentru că nu determină formarea de cruste sau depozite.

Datorită lipsei conservanților, HYLO COMOD® este, în general, foarte bine tolerat. În plus, HYLO COMOD® nu conține fosfați, astfel încât sunt evitate complicațiile, precum depozitele la nivelul corneean.

Cum ar trebui aplicat HYLO COMOD®?

Nu utilizați HYLO COMOD® dacă ambalajul a fost rupt sau desigilat înaintea primei utilizări (☹).



Pașul 1:

Înlăturați capacul înainte de utilizare. Pentru aceasta, țineți capacul de deasupra flaconului. Cu cealaltă mână, trageți flaconul din capac printr-o mișcare de rotație.

Înainte primei aplicări, poziționați flaconul HYLO COMOD® cu vârful îndreptat în jos și apăsați la baza flaconului în mod repetat, până la căderea primei picături din vârf. Acum flaconul este pregătit pentru a fi utilizat.



Pașul 2:

Țineți flaconul întors și poziționați degetul mare la baza picurătorului și celelalte degete la baza inferioară a acestuia.




Pașul 3:

Susțineți mâna ce ține flaconul COMOD® cu cealaltă mână, așa cum vedeți în imagine.



Pașul 4:

În timpul utilizării, evitați contactul dintre vârful flaconului și ochiul sau pielea dumneavoastră. Lăsați capul ușor pe spate, trageți ușor în jos pleoapa inferioară. Aplicați o presiune fermă și rapidă pe centrul bazei inferioare a flaconului. Acest proces va activa mecanismul de eliberare a unei picături. Datorită sistemului special cu valvă COMOD®, dimensiunea și viteza fiecărei picături este aceeași tot timpul, indiferent de câtă presiune este aplicată. Închideți ușor ochiul pentru a permite fluidului să se distribuie în mod egal pe suprafața ochiului.

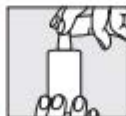

Pașul 5:

Puneți imediat capacul la loc după folosire. Aveți grijă ca vârful picurătorului să fie uscat.

Contactați producătorul în caz că aveți întrebări referitoare la utilizarea corectă a dispozitivului medical.

Flaconul COMOD® conține 10 ml de soluție, adică echivalentul a aproximativ 300 de picături. Din motive tehnice, o cantitate minoră rămâne în flacon la epuizarea acestuia.

HYLO COMOD® este adecvat pentru tratamente de lungă durată și poate fi utilizat de către adulți și copii, fără limită de vârstă.

Flaconul HYLO COMOD® este doar al dumneavoastră, chiar dacă și alte persoane au simptome similare, acestea nu trebuie să vă utilizeze picăturile de ochi.

Ce altceva mai trebuie să știți dumneavoastră?

Dacă nu simțiți o îmbunătățire sau vă simțiți mai rău după câteva zile de utilizare, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Dacă folosiți alte picături pentru ochi, păstrați un interval de 30 minute între aplicări, iar HYLO COMOD® trebuie întotdeauna să fie utilizat ultimul. Unguentele oftalmologice, totuși, ar trebui întotdeauna aplicate după folosirea HYLO COMOD®.

Datorită lipsei conservanților, HYLO COMOD® este bine tolerat, chiar și în cazul unei utilizări pe termen lung. În cazuri foarte rare, au fost raportate reacții adverse, precum hipersensibilitate, senzație de arsură sau lăcrimare excesivă, durere, senzație de corp străin sau alte iritații locale temporare, care au dispărut imediat după întreruperea utilizării soluției HYLO COMOD®.

Țineți cont că este posibil ca vederea să fie încetșată temporar după aplicarea HYLO COMOD®, datorită vâscozității picăturilor de ochi. În cazuri foarte rare, acest lucru poate cauza dureri de cap temporare, la pacienți sensibili.

HYLO COMOD® poate fi utilizat în timpul portului de lentile de contact. După aplicarea lentilelor de contact este recomandat să așteptați aproximativ 30 de minute înainte să aplicați picăturile de ochi. Respectând acest lucru, evitați reacțiile de intoleranță, care se pot produce între soluțiile de îngrijire ale lentilelor de contact și HYLO COMOD®.

Conform dovezilor existente, HYLO COMOD® poate fi utilizat de către copii, femeile însărcinate sau cele care alăptează.

În caz de incidente serioase în timpul utilizării acestui dispozitiv medical sau ca rezultat al utilizării acestuia, adresați-vă producătorului ().

Cât de des și pe ce perioadă de timp puteți utiliza HYLO COMOD®?

În general, instalați o picătură de HYLO COMOD®, de trei ori pe zi, în fiecare ochi. Dacă utilizați HYLO COMOD® mai frecvent sau dacă nemulțumirile persistă mai mult de o săptămână, vă rugăm să vă consultați medicul sau farmacistul.

Când nu trebuie să folosiți HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® nu ar trebui folosit dacă aveți hipersensibilitate la unul din ingredientele sale.

Ce trebuie să știți despre păstrarea HYLO COMOD®?

A nu se păstra la mai mult de 25 °C ().

HYLO COMOD® poate fi folosit timp de 6 luni de la desigilare.

A nu se utiliza după data de expirare ().

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Aruncați dispozitivul medical la gunoi, în funcție de legislația națională. Această măsură vă va ajuta să protejați mediul.

Sunt disponibile următoarele variante de ambalaj:

Picături lubrifiante pentru ochi de 10 ml.

Data revizuirii prospectului:

Martie 2021

Producător ()

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Germania

Distribuit de:

AMD Nobel Pharmaceutical SRL

Str. Poet Barbu Mumuleanu Nr.8

Sector 2, București, România

031 104 0016 sau 0720 277 538

office@amd-nobel.ro

CE 0197

STERILE A

Dispozitiv medical

Simbol:	Explicație:
	Producător
	Distribuitor
	Dispozitiv medical
	Marcaj CE
	Sterilizat, utilizând proceduri tehnice aseptice.
	Nu utilizați dacă ambalajul extern este deteriorat.
	Numărul lotului
	Data de expirare (YYYY-MM)
	Citiți Instrucțiunile de utilizare.
	Nu depozitați la temperaturi peste 25 °C.
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient.