


KAdermín

spray cu pulbere



SCX TECHNOLOGY

SPRAY CU PULBERE

Vindecarea Rănilor

125 ml

KAdermín

SPRAY CU PULBERE

KADERMIN SPRAY CU PULBERE este considerat „dispozitiv medical”. Formularea de tip spray cu pulbere creează o barieră protectoare, fiind un adjuvant în tratamentul plăgilor, ulcerărilor, abraziunilor, arsurilor minore, leziunilor cutanate eozinice, iritațiilor de scute, măcerării pielii determinate de transpirație, precum și al leziunilor traumatiche superficiale. **KADERMIN SPRAY CU PULBERE** este indicat în tratamentul plăgilor postoperatorii, precum și al bonturilor de cordon ombilical restante după secționare. **KADERMIN SPRAY CU PULBERE** formează o peliculă de protecție împotriva agresiunilor microbiene, care ajută la accelerarea procesului de vindecare. Efectul de barieră de protecție este dat de asocierea caolinului cu acidul hialuronic: caolinul absoarbe excesul de apă, în timp ce acidul hialuronic stimulează hidratarea țesuturilor. Datorită proprietăților antimicrobiene ale complexului brevetat SCX (dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), bariera creează de caolin și acidul hialuronic.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de utilizare, curățați pielea cu ser fiziologic, apoi uscați-o cu grijă. 2. Agitați bine înainte de utilizare. 3. Aplicați un strat subțire de pulbere doar pe suprafața afectată, de la o distanță de 10 cm. 4. Nu masați; pulberea trebuie să formeze un strat protector continuu. 5. Schimbați pansamentul o dată sau de mai multe ori pe zi, în cazul tratamentului iritațiilor de scute sau entemului submamar, arsurilor și leziunilor traumatiche superficiale: repetați aplicarea la fiecare 48 de ore, în cazurile în care există leziuni care trebuie tratate de personal medical. 6. În cazul leziunilor deschise, aplicați o compresă umedă ca pansament secundar, apoi un bandaj steril pentru a-l acoperi.

ATENȚIONĂRI

- Exclusiv pentru uz extern; a nu se ingera.
- Evitați contactul cu ochii; în caz de contact, clătiți imediat cu apă.
- A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat.
- A nu se steriliza.

Precauții pentru utilizare: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi mai mici de 5° C sau mai mari de 50° C. Nu perforați și nu ardeți, nici chiar după utilizare. A se utiliza numai în scopurile indicate. Nu îndreptați jetul pulverizat spre ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe flăcări deschise sau alte surse de aprindere. A se utiliza numai în spații deschise. În caz de ingestie sau pulverizare în ochi, solicitați imediat asistență medicală calificată sau contactați un centru toxicologic și furnizați-le informațiile despre produs menționate pe etichetă.


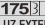
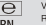





TEHNOLOGIA SCX



VINDECAREA RĂNILOR

- După utilizare, aplicați capacul cu atenție.
- A nu se utiliza după data de expirare.
- Interziceți tratamentul dacă apar reacții cutanate anormale; informați medicul dumneavoastră și producătorul.
- Pentru aplicare nu este nevoie de personal medical.


CONTRAINDICAȚII:
Nu s-au raportat cazuri de supradozaj și nici interacțiuni cu alte medicamente și substanțe medicale. Nu s-au raportat fenomene de sensibilizare alergică, însă s-a raportat prezența dioxidului de aluminiu (Al₂O₃). Nu utilizați în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente. Se recomandă utilizarea în timpul sarcinii și pe perioada alăptării numai sub supravegherea unui medic.

Compoziție:
SCX (dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, siliciu, hialuronat de sodiu. Agent propulsor: amestec de butan-propan.


 A se vedea partea inferioară a tubului
 175
 UZ EXTERN
 +5°C





Volum net – tub de 125 ml
 Rev. 2 dated 15/10/2019
 Dispozitiv medical clasa II B
  1370

PAVA FARMACEUTICI s.r.l.
 Via Vatarino 14F
 27010 Copiano (PV) ITALY
 Reprezentant unic în România:
 MEA PHARMA INNOVATION
 Calea Moșilor nr. 158, etaj 6,
 birou 7, sector 2, București

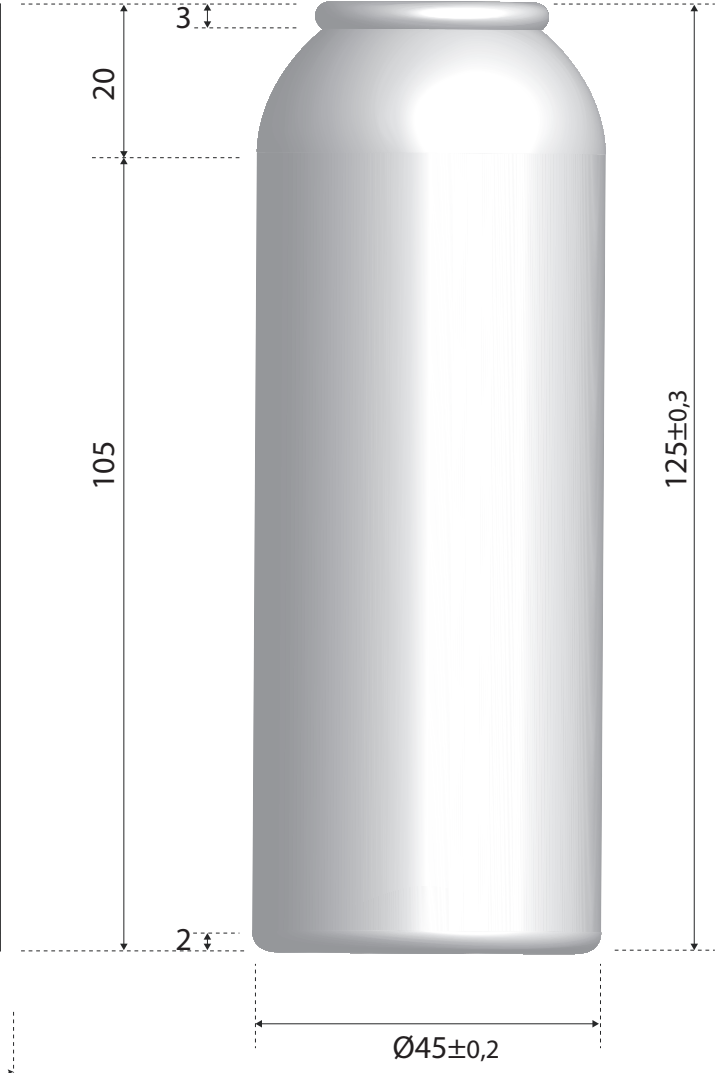

0 704715 359957



139 + 1,5 solapado