

68430 Duș pentru igiena intimă după naștere, Lansinoh

Curăță delicat cu un jet blând de apă, zona intimă după naștere.

Sugestie de utilizare: Pulverizați un jet constant de apă caldă în timpul urinării pentru un confort liniștitor. Doar pentru uz extern. Umpleți recipientul cu apă caldă și înfiletați ferm capacul. În timp ce stați pe toaletă, poziționați dușul vaginal între picioare, cu vârful capătului prin care iese jetul de apă îndreptat spre zona perineală fără a atinge pielea. Apăsăți ușor pe recipient pentru a ieși jetul de apă, începeți să urinați și pulverizați continuu jetul de apă. Utilizați dușul pentru o curățare delicată, după cum este necesar. Goliți recipientul și curățați-l conform instrucțiunilor. După fiecare utilizare, dezasamblați, curățați-l și clătiți-l bine doar cu săpun și apă caldă.

Nu fierbeți produsul. Lăsați-l să se usuce înainte de depozitare. Capacitate 360 ml

Importator: Next Step Investments SRL, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22; Building Green Gate Offices et.5 office 505; Sector 5 Bucuresti, Romania Tel: 0749060830, Email: office@nextstep.ro www.nextstep.ro