



# nebianax3%

Fiole




buOna

## Soluție salină hipertonică 3% cu acid hialuronic

---

### INDICAȚII



**NEBIANAX 3%** fiole este o soluție salină hipertonică - 3%, cu pH fiziologic cu adaos de acid hialuronic, gata de utilizare. **NEBIANAX 3%** are o acțiune de desconggestionare asupra mucoasei nazale, precum și un efect de fluidificare asupra mucusului. Ajută la drenarea secrețiilor și, prin urmare, este util pentru menținerea igienei foselor nazale, în special în caz de răceală, rinită alergică, rinosinuzită și sinuzită; în general, permite eliberarea nasului înfundat, îmbunătățind astfel respirația. Prezența acidului hialuronic face ca **NEBIANAX 3%** să fie deosebit de adecvat pentru administrarea la copii. Acidul hialuronic este o substanță produsă în mod natural de organismul nostru, care are sarcina de a menține hidratarea țesuturilor. Aderă la suprafața mucoasei și, prin reținerea apei într-un mod fiziologic, formează un film de protecție care ameliorează iritația mucoasei. Favorizează umidificarea foselor nazale, îmbunătățește palatabilitatea și face soluția hipertonică mai plăcută. Soluția conținută în fiolele cu doză unică poate fi utilizată pentru terapia cu aerosoli.

### COMPOZIȚIE


**NEBIANAX 3%** fiole conține: Clorură de sodiu, hialuronat de sodiu, fosfat de potasiu dibazic, fosfat de potasiu monobazic, apă. Nu conține conservanți.

### MOD DE UTILIZARE

- Desprindeți o fiolă cu doză unică și încălziți-o în mâini înainte de a administra soluția. Rotiți capacul pentru a deschide fiola;
- mențineți capul înclinat într-o parte (nu înclinați niciodată înapoi), introduceți ușor vârful fiolei în nara superioară și apăsați ușor;
- rotiți capul în partea cealaltă și repetați operațiunea pentru nara opusă.

În cazul utilizării soluției pentru terapia cu aerosoli, se recomandă să urmați instrucțiunile aparatului.

### ADMINISTRARE



Sugari: picurați câteva picături în fiecare nară, de câteva ori pe zi, în general înainte de alăptare sau înainte de culcare. Copii și adulți: 1-3 spălări în fiecare nară, 2-3 ori pe zi.

Se recomandă utilizarea Nebial 3% pentru o perioadă care nu depășește 15 zile sau conform sfatului medicului.

### AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE

- Soluția nu este injectabilă.
- Utilizați produsul exclusiv în scopul pentru care este destinat.
- La copiii cu vârsta sub 6 ani și în cazul administrării concomitent cu alte medicamente, utilizați numai pe baza sfatului medicului.
- În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea produsului și contactați medicul.



- A nu se utiliza în caz de incompatibilitate sau alergie la una dintre componentele preparatului.
- Nu se recomandă utilizarea în caz de leziuni și abraziuni ale mucoasei nazale sau predispoziție la sângerări nazale.
- În cazul utilizării soluției pentru terapia cu aerosoli, se recomandă să urmați instrucțiunile aparatului.
- Produsul trebuie păstrat ferit de surse de lumină și căldură (nu la frigider).
- După utilizare, închideți imediat fiola: conținutul fiolei trebuie reutilizat în următoarele 12 ore de la prima deschidere.
- A nu se utiliza dacă recipientul este deteriorat.
- A nu se utiliza după data de expirare.
- Data de expirare indicată se referă la produsul intact și depozitat corect.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.

## EFECTE ADVERSE

Soluțiile hipertionice, în special la copii mici, pot provoca un disconfort modest la primele aplicații cu senzație de reducere a capacității auzului și arsuri a mucoasei nazale, și rareori epistaxis. Simptomele sunt reduse odată cu întreruperea tratamentului. Produ-

sul a prezentat un singur efect secundar minor, descris ca tuse și ușoară senzație de arsură în nas. Testele efectuate până în prezent asupra produsului nu au evidențiat fenomene de sensibilizare. Substanțele conținute în **NEBIANAX 3%** au siguranță dovedită și permit chiar și utilizarea repetată.

## AMBALAJE

**NEBIANAX 3%** este un dispozitiv medical clasa 2A și este disponibil în 2 tipuri de ambalaje:

- **NEBIANAX 3% fiole** (20 de fiole cu doză unică de 5 ml).
- **NEBIANAX 3% spray nazal** (recipient de 100 ml de soluție cu distribuitor pediatric).

 Producător: Steve Jones srl  
Via Alfieri 8, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Italia  
[www.buona.it](http://www.buona.it) - [info@buona.it](mailto:info@buona.it)

Distribuitor pentru România:  
Rontis Romania Pharma Srl  
Str. Frasinului nr.21, sect.1, București, România  
Tel/Fax: 031.432.62.11, 031.432.62.17  
[www.rontis.ro](http://www.rontis.ro) - [info@rontis.com](mailto:info@rontis.com)

 **0546**  
Dispozitiv medical

Data ultimei revizui: Februarie 2021

Pe piață este disponibil și un kit asamblat, **NEBIANAX 3% KIT**, care conține **NEBIANAX 3% fiole**, pulverizator **Spray-sol®** (brevet sub licența exclusivă a companiei Steve Jones srl), ac canulă și **Seringă Luer Lock** de 5 ml. Steve Jones srl efectuează asamblarea acestui kit.

**buOna®**  
este o marcă înregistrată,  
proprietate a companiei  
 Steve Jones

Steve Jones srl este o companie cu un sistem de management al calității certificat ISO 9001