



Sun Wave Pharma

Rino Sun[®]

Indicații

Pentru tratamentul durerilor în gât la copiii cu vârsta peste 3 ani.

Forma de prezentare

Recipient din aluminiu cu pulverizator, de 20 ml (aproximativ 85 pufuri).

Compoziție

Glicerol, Apă, Miere, Glycocyanidin-E (derivat din extracte din sămburi de Vitis vinifera, fructe de Sambucus nigra și Ribes nigrum).

Mod de acțiune

RinoSun[®] este o soluție hipertonică, vâscoasă, care formează un film de protecție la nivelul mucoasei, special formulat să trateze durerile în gât ale copiilor cu vârsta peste 3 ani. Când este pulverizat în gât, RinoSun[®] formează un film osmotic activ care atrage prin acțiune mecanică fluidul hipotonic de la nivelul gâtului. Acest flux exterior, puternic și continuu, de lichid detașează mecanic și drenează contaminații prezente la nivelulul gâtului, incluzând bacterii, virusuri, celule moarte și resturi celulare. Dispozitivul acționează astfel ca o soluție instantanee de curățare. Curățând mucoasa gâtului, dispozitivul stimulează apărarea și vindecarea acesteia. RinoSun[®] are acțiune topică și mecanică, fără a fi absorbit în organism. Filmul creat protejează, de asemenea, gâtul de iritație și de agresiunea externă. Rezultatele clinice arată o reducere rapidă și evidentă a durerii, iritației, roșeții și inflamației, precum și a depozitului albicios de la nivelul gâtului. Reducerea contaminării bacteriene minimizează nevoia de antibiotice. RinoSun[®] ajută la prevenirea evoluției infecției de la nivelul gâtului dacă este aplicat din faza inițială a infecției.

Mod de utilizare

Agitați ușor flaconul și îndepărtați capacul, și, înainte de prima utilizare, apăsați o dată sau de două ori pe pulverizator pentru punerea în funcțiune a pompei dozatoare. Apoi îndreptați vârful aplicatorului dispozitivului cum se arată în imaginea de mai jos și apăsați pe pulverizator pentru a elibera produsul în partea superioară a gâtului. Pulverizați de 4 – 5 ori pentru a forma un strat subțire de produs la nivelul mucoasei gâtului. Produsul fiind vâscos, unele picături de produs pot rămâne pe vârful pulverizatorului. Ștergeți vârful cu ajutorul unei hârtii absorbante sau al unui bețișor igienic din bumbac și puneți la loc capacul după fiecare utilizare. Respectați modul de utilizare recomandat. La copiii mici produsul ar trebui aplicat de un adult sau cel puțin sub supravegherea/cu ajutorul unui adult.



Aplicați în partea
superioară a gâtului

Se recomandă utilizarea la fiecare 20 – 30 minute la începutul tratamentului, în primele 2 – 3 ore, și apoi de 3 – 4 ori pe zi, până la recuperarea completă.

Dozajul zilnic furnizează mai puțin de 2 g zahăr pe zi.

Precauții

Produsul este doar pentru uz topic (la nivelul gâtului). Citiți instrucțiunile din prospect cu atenție, înainte de utilizare. Spălați-vă pe mâini înainte de aplicare. Pentru a evita contaminările încrucișate, fiecare spray trebuie folosit doar de câte un pacient. Pulverizați doar în partea superioară a gâtului, evitând inhalarea în timpul pulverizării. Se va evita consumul de alimente sau lichide în următoarele 15 – 30 minute după aplicarea produsului.

Recomandăm să cereți sfatul medicului dacă simptomele persistă, fără o îmbunătățire, după 7 zile de utilizare a produsului RinoSun®.

Păstrare

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Păstrați la temperatura camerei. Nu păstrați produsul la frigider; feriți-l de îngheț. Nu folosiți produsul după data de expirare sau mai mult de 30 de zile după prima administrare, nu utilizați produsul dacă pulverizatorul este deteriorat.

Interacțiuni

Datorită compoziției și a modului de acțiune, mecanic & topic, probabilitatea de interacțiune cu orice tratament sistemic este mică. Nu aplicați un alt tratament care acționează la nivelul gâtului 15 minute înainte sau după folosirea acestui produs.

Contraindicații

Verificați compoziția produsului și nu utilizați la copilul care este alergic sau sensibil la oricare ingredient din compoziția RinoSun® (mierea poate conține urme de polen). Chiar dacă ingredientele folosite la prepararea acestui produs sunt derivate din ingrediente alimentare și sunt folosite în cantități foarte mici, în absența unor suficiente date specifice de siguranță, nu recomandăm utilizarea RinoSun® la copiii cu vârsta sub 3 ani, la pacienții care suferă de astm sau afecțiuni respiratorii severe. Nu se va folosi pentru copii cu vârsta sub 1 an. Nu se recomandă utilizarea produsului de către femeile însărcinate sau care alăptează fără consiliere medicală.

Efecte adverse

RinoSun® nu este periculos dacă este înghițit. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, spălați bine ochii cu apă. Dacă observați, în primele minute după aplicarea produsului, vreun tip de reacție alergică, încetați să utilizați produsul și spălați gâtul cu apă curată, proaspătă și dacă e necesar consultați un profesionist din domeniul medical. Dacă observați un incident important din cauza utilizării acestui produs, vă rugăm să anunțați imediat producătorul/distribuitorul și autoritățile naționale competente.

Ambalajul (inclusiv flaconul) poate fi eliminat ca deșeu menajer după utilizare.

Revizuire prospect/versiune: PEN b3-0120

Dispozitiv medical

Producător:

VITROBIO SAS
ZAC de Lavour
63500 ISSOIRE
France
Email: secretariat@vitrobio.com

Distribuitor:

ASCENDIS WELLNESS SRL
Calea Floreasca, nr. 169
Sector 1, București, România
office@sunwavepharma.com



Sun Wave Pharma

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACESAȚI

WWW.SUNWAVEPHARMA.COM

Fabricat în Franța

