

IT) Istruzioni per l'uso: pulire la ferita e disinfettare l'area circostante. Applicare la garza sulla ferita fissandola con un cerotto, con una rete tubolare o con una benda coesiva. Rinnovare quando necessario. **Composizione:** viscosa 67%, poliestere 33%. **Avvertenze:** utilizzare solo per la compressione della ferita e/o per l'assorbimento degli essudati. Non utilizzare come invasivo di tipo chirurgico. Il riutilizzo è causa potenziale di infezioni e/o di contaminazione per il paziente. Se il prodotto è utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso fornite, non sono note controindicazioni o effetti secondari. Smaltire secondo le normative locali vigenti. *E necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al Fabbricante e all'Autorità Competente dello Stato membro di riferimento.*

EN) Instructions for use: Clean the wound and disinfect the area around it. Place the pad onto the wound, sticking it down with a plaster, a tubular mesh bandage or a cohesive bandage. Replace as necessary. **Composition:** 67% viscose, 33% polyester. **Caution:** Only use for wound compression and/or absorption of exudate. Not for invasive surgical use. Reuse is a potential cause of infection or contamination for the patient. If the product is used in accordance with the instructions for use provided, there are no known contraindications or side effects. Dispose of according to local regulations. *Any serious incident which occurs in relation to the device must be reported to the manufacturer and the relevant authority of the member state in question.*

RO) Instrucțiuni de utilizare: curățați plaga și dezinfecțati zona înconjurătoare. Aplicați compresa pe plagă fixând-o cu un plăsture, o plasă tubulară sau un bandaj coeziv. Schimbați-o când este necesar. **Compoziție:** vâscoză 67%, poliester 33%. **Atenționări:** a se utiliza numai pentru compresia plăgii și/sau absorbția exsudatului. A nu se utiliza ca dispozitiv invaziv de tip chirurgical. Reutilizarea reprezintă o cauză potențială de infecție și/sau contaminare pentru pacient. Dacă produsul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate, nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. A se elimina în conformitate cu reglementările locale în vigoare. *Orice incident grav apărut în legătură cu dispozitivul trebuie semnalat Producătorului și Autorității competente din statul membru de referință.* www.origomedical.ro



REF 300.22

