

HYLO DUAL®

Hialuronat de sodiu și ectoină.

Umectează ochii uscați, stabilizează filmul lacrimal și ameliorează simptomele inflamatorii și alergice, precum senzațiile de mâncărime și arsură.

Soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți.

Ce este HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® este o soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți, pentru utilizare oculară.

Compoziție:

1 ml de HYLO DUAL® conține 0.5 mg de hialuronat de sodiu, 20 mg de ectoină, acid boric, borax și apă pentru soluții injectabile.

La ce este folosit HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® umectează corneea și conjunctiva și protejează împotriva evaporării excesive a lacrimilor. Această stabilizare a lacrimilor ameliorează simptomele inflamatorii, în cazul ochilor iritați. În plus, ameliorează senzația de mâncărime și arsură, asociate cu alergiile.

Când se folosește HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® este indicat pentru tratamentul afecțiunii de ochi uscat.

Arsurile, mâncărimea, lăcrimarea, senzația de corp străin sau senzația de ochi uscat sunt simptome ale unui ochi iritat. În mod frecvent, acesta este un rezultat al lubrifierii insuficiente a suprafeței oculare. Alte simptome pot fi declanșate de către hipersensibilitatea la anumite substanțe (de exemplu, polen, păr de animale sau praf), așa-numite alergii. Deoarece o alergie prezintă simptome similare, este dificil să se facă diferența între un ochi uscat sau unul alergic.

În aceste cazuri, modul dual de acțiune al hialuronatului de sodiu și al ectoinei din HYLO DUAL® ajută la ameliorarea acestor simptome.

HYLO DUAL® conține hialuronat de sodiu, o substanță fiziologică, care se găsește în ochi, dar și în alte țesuturi ale corpului. Hialuronatul de sodiu asigură o lubrifiere uniformă, stabilă, în special de lungă durată, a suprafeței oculare, fără a fi înălțat rapid.

Ectoina este o substanță naturală, obținută din microorganisme care trăiesc într-un mediu extrem (de exemplu, lacuri sărate). Pentru a fi protejate împotriva acestor condiții extreme de mediu, aceste microorganisme sintetizează substanța naturală numită ectoină. Proprietățile sale specifice sunt utilizate în HYLO DUAL®. Ectoina crește legarea moleculelor de apă la nivelul celulelor suprafeței oculare. Aceasta formează o barieră fiziologică la nivelul conjunctivei împotriva substanțelor cu acțiune alergică. Ectoina stabilizează stratul lipidic al filmului lacrimal, care protejează împotriva evaporării excesive a lacrimilor.

Interacțiunea hialuronatului de sodiu și a ectoinei asigură o lubrifiere intensă, de lungă durată, a suprafeței oculare și protejează împotriva evaporării lacrimilor. Simptomele obișnuite de mâncărime și de arsură, care apar ca reacții inflamatorii la iritațiile provocate de mediu, precum și la reacțiile alergice, sunt ameliorate de HYLO DUAL®.

Cum ar trebui aplicat HYLO DUAL®?

Vă rugăm să nu folosiți HYLO DUAL® dacă oricare parte a ambalajului este ruptă sau deteriorată înainte de prima utilizare (☹).



Pasul 1:

Înlăturați capacul înainte de utilizare.

Pentru acest scop, țineți de capacul situat deasupra dispozitivului. Cu cealaltă mână, scoateți dispozitivul din capac cu o mișcare rotativă. Înainte de prima aplicare, întoarceți dispozitivul HYLO DUAL® cu vârful în jos și apăsați pe baza dispozitivului în mod repetat, până când apare prima picătură la duză. Acum dispozitivul este gata pentru utilizare ulterioară.



Pasul 2:

Țineți dispozitivul întors cu degetul mare poziționat la baza picurătorului și celelalte degete pe baza inferioară a dispozitivului.




Pasul 3:

Susțineți mâna ce ține dispozitivul COMOD® cu cealaltă mână, așa cum vedeți în imagine.



Pasul 4:

Când aplicați picăturile de ochi, vă rugăm să evitați orice contact dintre vârful dispozitivului și ochii sau pielea dumneavoastră. Cu capul lăsat ușor pe spate, trageți ușor în jos pleoapa inferioară. Apăsați baza dispozitivului ferm și rapid. Acest lucru va activa mecanismul de eliberare a unei picături. Datorită sistemului special COMOD® cu valvă, dimensiunea și viteza fiecărei picături rămân constante, indiferent de câtă presiune este aplicată la baza dispozitivului. Închideți ușor ochiul pentru a permite fluidului să se distribuie în mod egal pe suprafața ochiului.

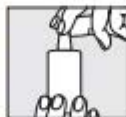

Pasul 5:

Puneți imediat capacul la loc, după folosire. Asigurați-vă că vârful picurătorului să fie uscat.

Vă rugăm să contactați producătorul în cazul oricăror întrebări referitoare la utilizarea corectă a acestui dispozitiv medical.

Un flacon care conține 10 ml de soluție corespunde la aproximativ 300 de picături. Din motive tehnice, o cantitate minoră rămâne întotdeauna în flacon la epuizarea acestuia.

HYLO DUAL® este adecvat pentru tratamente de lungă durată și poate fi utilizat de către adulți și copii cu vârsta peste 6 ani.

Fiecare dispozitiv HYLO DUAL® ar trebui să fie folosit doar de aceeași persoană (☺).

Ce altceva mai trebuie să știți dumneavoastră?

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău după câteva zile de utilizare, consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Dacă folosiți oricare alte picături pentru ochi, ar trebui să păstrați un interval de minim 30 de minute între aplicări, iar HYLO DUAL® ar trebui întotdeauna să fie utilizat ultimul. Unguentele oftalmologice ar trebui, totuși, să fie administrate întotdeauna după utilizarea HYLO DUAL®.

Datorită lipsei conservanților din HYLO DUAL®, acesta este bine tolerat, chiar și în cazul utilizării pe termen lung. În cazuri foarte rare, au fost raportate reacții adverse, precum hipersensibilitate, senzații de arsură sau lăcrimare excesivă, durere, senzație de corp străin sau alte iritații locale temporare, care au dispărut după întreruperea utilizării dispozitivului HYLO DUAL®.

Vă rugăm să rețineți faptul că este posibil ca vederea să fie încetățită temporar după aplicarea HYLO DUAL®, datorită vâscozității soluției picăturilor de ochi. În cazuri foarte rare, acest lucru poate cauza dureri de cap temporare la pacienții sensibili.

HYLO DUAL® poate fi utilizat în timpul purtării lentilelor de contact. După introducerea lentilelor de contact, este recomandat să așteptați aproximativ 30 de minute înaintea aplicării picăturilor de ochi. Astfel, evitați reacții de intoleranță, care pot apărea din cauza interacțiunii dintre produsele de îngrijire a lentilelor și HYLO DUAL®.

Conform dovezilor disponibile, HYLO DUAL® poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 6 ani, femeile însărcinate sau cele care alăptează.

În cazul în care un incident serios a avut loc în timpul utilizării acestui dispozitiv medical sau ca rezultat al utilizării acestuia, vă rugăm să raportați producătorului ().

Cât de des și pe ce perioadă de timp puteți folosi HYLO DUAL®?

În general, pentru adulți și copii cu vârsta peste 6 ani, instalați o picătură de HYLO DUAL® de trei ori pe zi, în sacul conjunctival al fiecărui ochi. Dacă utilizați HYLO DUAL® mai frecvent (de exemplu, mai mult de 10 ori pe zi) sau când suferiți de simptome mai severe, ar trebui să consultați un medic oftalmolog la intervale regulate.

În timpul sarcinii și alăptării, HYLO DUAL® nu trebuie folosit de mai mult de 10 ori pe zi, deoarece conține soluție tampon de borat.

HYLO DUAL® este potrivit pentru tratamentul de lungă durată. Totuși – ca la toate simptomele persistente – ar trebui să consultați medicul dumneavoastră oftalmolog, dacă simptomele nu se îmbunătățesc, de exemplu, timp de două săptămâni.

Când nu trebuie să folosiți HYLO DUAL®?

HYLO DUAL® nu ar trebui folosit dacă aveți hipersensibilitate la unul dintre ingredientele acestuia și nu este indicat copiilor sub 6 ani.

Ce trebuie să știți despre depozitarea HYLO DUAL®?

A nu se păstra la mai mult de 25 °C ().

HYLO DUAL® poate fi folosit timp de 6 luni de la desigilare.

A nu se utiliza după data de expirare ().

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Anunțați acest dispozitiv medical conform legislației naționale referitoare la deșeurile menajere. Această măsură va ajuta la protecția mediului.

Sunt disponibile următoarele variante de ambalaj:

Picături lubrifiante pentru ochi de 10 ml.

Picături lubrifiante pentru ochi de 5 ml (mostră – nu se vinde).

Data revizuirii prospectului:

ianuarie 2025

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Germania


AMD Nobel Pharmaceutical SRL

Str. Poet Barbu Mumuleanu, nr. 8

Sector 2, București, România

031 104 0016 sau 0720 277 538

office@amd-nobel.ro

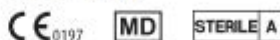

Simbol:	Explicație:
	Producător
	Distribuitor
	Dispozitiv medical
	Marcaj CE
	Sterilizat, utilizând proceduri tehnice aseptice.
	Nu utilizați dacă ambalajul extern este deteriorat.
	Numărul lotului
	Data de expirare (YYYY-MM)
	Citiți Instrucțiunile de utilizare.
	Nu depozitați la temperaturi peste 25 °C.
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient.