

ZANO *inspire*

Respira usor cu ZANO – Tratament eficient pentru ameliorare rapida

ZANO INSPIRE AVANTAJE

- Design Compact
- Zgomot scazut in timpul folosirii – 55db
- Diametrul optim al particulelor pentru tartare eficienta
- Pentru copii si adulti
- Volum residual scazut



Respira usor cu ZANO – tratament eficient pentru ameliorare rapida

Q&A

- Care este sloganul ZANO

Respira usor cu ZANO – tratament eficient pentru ameliorare rapida

- Care sunt avantajele ZANO?

Silentios 55db, design compact, dimensiune optima a particulelor pentru un tratament eficient, poate fi folosit si de adulti si de catre copii.

- Care este dimensiunea optima a particulelor, pentru o eficienta marita a terapiei prin nebulizare?

Particulele cu dimensiune intre 1-5 μ m sunt considerate optime pentru o mai buna penetrare.

- Care este dimensiunea particulelor generate de ZANO?

ZANO genereaza particule cu dimensiune 1-5 μ m, dintre care mai mult de 60% au dimensiune 3.8 μ m sau mai mici.

- Daca particulele sunt mai mari de 5 μ m, ce se intampla?

Particulele mai mari de 10 μ m vor fi filtrate in interiorul nasului, iar cele intre 5-10 μ m vor ajunge doar pe caile respiratorii inferioare.

Q&A

- Care sunt diferentele dintre nebulizatoarele cu compressor si cele cu ultrasunete?
 - Aparatele cu ultrasunete sunt in general mai mici si mai silentioase
 - Tehnologii diferite (ultrasunete: prin vibratia unei placi metalice, compressor: prin presiunea aerului)
 - Daca substantele medicamentoase sunt uleioase, aparatele cu ultrasunete nu le pot nebuliza.
 - Pret mai mare pentru ultrasunete
- Pentru cate minute poate functiona nebulizatorul ZANO? 20 min si apoi aparatul trebuie sa fie oprit timp de 40min
- Care este capacitatea max a kitului de nebulizare? 10ml
- Ce contine cutia ZANO? Compresorul (unitate principala), kit de nebulizare, adaptor, masca pentru copii, masca adulti, piesa de gura, 5*filtre de aer
- Cati ani garantie are ZANO? 3 ani unitatea principala, 2 ani adaptor