

Traduction du français en roumain du texte sur l'étui

## MARIMER

Spray decongestionant cu sistem de protecție ANTIBACTERIAN  
Nas foarte înfundat/ congestionat

Apă de mare 100% naturală hipertonică  
Îmbogățită cu uleiuri esențiale BIO

20 ml format de călătorie

- Formulă naturală\*
- Conferă o senzație de prospețime

MARIMER decongestionant nazal, îmbogățit cu uleiuri esențiale, calmează și reduce congestia mucoasei nazale.

COMPOZIȚIE: apă de mare 100 naturală (63%) , extract hidroglicerinat din propolis, uleiuri esențiale de mentă de câmp, mușețel roman și eucalipt globulus, ulei de ricin polioxilat 40, acid citric, citrat de sodiu. Fără conservanți, fără decongestionant medicamentos.

INDICAȚII: Sprayul MARIMER decongestionant nazal este recomandat adulților și copiilor peste 3 ani pentru decongestionarea nasului înfundat, în special în caz de răceală, rinofaringită și rinită alergică. Poate fi folosit de femeile însărcinate sau care alăptează.


A nu se depăși data limită de utilizare indicată pe cutie. **A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.**

\* constând din 99,5% ingrediente de origine naturală.

Fabricat de Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair – Franța. Fabricat în Franța. Distribuitor: BIESEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, sector 6, București, tel: 021 408 63 33.



dispozitiv medical

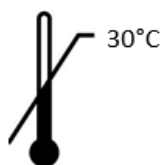

## Marimer

Apă de mare 100% naturală hipertonică

MARIMER decongestionant nazal este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Desfundă nasul prin efectul osmotic și facilitează eliminarea secrețiilor nazale datorită concentrației hipertonică.

În asociere cu uleiurile esențiale de Eucalyptus globulus, mentă de câmp și mușețel roman și cu extractul din propolis, calmează și reduce congestia mucoasei nazale. Astfel, desfundă nasul, îl purifică, eliminând mucusul încărcat de bacterii și virusuri, și conferă o senzație de prospețime și de respirație nazală eliberată. Sistemul său de protecție antibacterian protejează compoziția de contaminările externe.

COMPOZIȚIE: apă de mare 100 naturală (63%) , extract hidroglicerinat din propolis, uleiuri esențiale de mentă de câmp, mușețel roman și Eucalyptus globulus, ulei de ricin polioxilat 40, acid citric, citrat de sodiu. Fără conservanți, fără decongestionant medicamentos.

PREZENTARE: flacon micropulverizator de 20 ml. Pompă nazală dozatoare cu sistem de protecție antibacterian (aproximativ 200 pulverizări).

INDICAȚII: Sprayul MARIMER decongestionant nazal este recomandat adulților și copiilor peste 3 ani pentru decongestionarea nasului înfundat, în special în caz de răceală, rinofaringită și rinită alergică. Poate fi folosit de femeile însărcinate sau care alăptează.

POSOLOGIE: 1-2 pulverizări, de 3 ori pe zi în fiecare nară, la nevoie.

### MOD DE UTILIZARE:

- Scoateți capacul protector.
- Introduceți cu grijă aplicatorul în nară, ținând capul drept.
- Pulverizați de 1-2 ori în fiecare nară, apăsând pe pompă.
- Repetați pentru cealaltă nară.
- Ștergeți excesul.
- Lăsați să acționeze, apoi suflați nasul dacă este nevoie.

PRECAUTII DE UTILIZARE: Spălați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și ștergeți.

EFFECTE NEDORITE: La începutul utilizării, pot apărea senzații trecătoare de furnicături sau iritații.

ATENȚIONĂRI: Cereți sfatul farmacistului sau medicului în cazul utilizării la persoanele care suferă de boli care antrenează o îngustare a căilor nazale (de exemplu astm,...). A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare și/sau de alergii cunoscute la oricare dintre ingrediente. Contraindicat copiilor sub 36 luni. A nu se utiliza la copiii cu antecedente de convulsii febrile.

În caz de supradozaj, consultați farmacistul și/sau medicul. Dacă simptomele persistă sau se accentuează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv

către Laboratoires Gilbert - site Internet: [www.labogilbert.fr](http://www.labogilbert.fr) și/sau către autoritatea națională competentă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: A nu se depăși data limită de utilizare indicată pe cutie. A se păstra la temperaturi sub 30°C. **A NU SE LASA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.**

Fabricat de Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair – Franța. Fabricat în Franța. Distribuitor: BIESSEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, sector 6, București, tel: 021 408 63 33.



dispozitiv medical



An: 2015

