

Manual nasal aspirator 1

Descrierea produsului

Aspiratorul nazal manual este un dispozitiv care se utilizează pentru a aspira secrețiile nazale ale bebelușului prin suucțiune. Dispozitivul conține o piesă pentru gură, un tub și un recipient pentru secreții.

Utilizare indicată:

Aspiratorul nazal manual Braun (și filtrele asociate) este destinat asigurării unei aspirații intermitente pentru îndepărtarea secrețiilor nazale și mucoase la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani. Numai pentru uz casnic. Filtrele asociate (din această cutie și BNF020) sunt de unică folosință.



Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aspiratorul nazal manual Braun, în special aceste informații de siguranță de bază.

- Aspiratorul nazal manual Braun este destinat exclusiv curățării/extragerii secrețiilor nazale. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele menționate în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor cu vârsta sub 12 ani.
- Nu expuneți aspiratorul nazal manual Braun la lumina directă a soarelui.
- Acest dispozitiv este conceput exclusiv pentru uz casnic. Consultați un medic dacă copilul suferă de o infecție nazală.
- Nu utilizați alte vârfuri decât cele furnizate cu acest dispozitiv.
- Nu reutilizați filtrul.
- Utilizați numai filtre Braun de aspirație nazală de unică folosință cu acest dispozitiv.



PERICOL DE SUFOCARE - Poate conține părți mici detașabile. Nu lăsați la îndemâna copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Curățare

Pentru a curăța aspiratorul nazal manual Braun 1, deschideți recipientul prin răsucire și detașați-l. Curățați cu săpun și apă caldă, cu excepția tubului. De asemenea, puteți pune părțile detașabile (piesa de gură, vârfurile pentru aspirație și recipientul) în mașina de spălat vase, cu excepția tubului. Alternativ, toate părțile dispozitivului pot fi fierte timp de 15 minute. Această ultimă metodă este obligatorie pentru tub.

Înlocuiți filtrul (filtrul dispozitivului de unică folosință BNF020EU) la fiecare utilizare pentru a menține igiena și pentru a preveni contaminarea încrucișată.

Garanție

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea acestui dispozitiv. Păstrați bonul fiscal sau factura de achiziție drept dovadă a datei de achiziție. Chitanța trebuie prezentată, în cazul oricărei reclamații în perioada de garanție relevantă. Nicio revendicare în baza garanției nu va fi valabilă, fără o dovadă a achiziției. Dispozitivul dumneavoastră este acoperit de garanție timp de doi ani (2 ani) de la data achiziției. Această garanție acoperă defectele de materiale sau de manoperă care apar în condiții normale de utilizare; dispozitivele defecte care îndeplinesc aceste criterii vor fi înlocuite gratuit. Garanția NU acoperă defecte sau daune rezultate în urma utilizării abuzive sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Garanția devine nulă dacă dispozitivul este deschis, manipulat sau utilizat cu alte mărci de piese sau accesorii decât Braun sau în cazul în care reparațiile sunt efectuate de persoane neautorizate. Accesoriile și consumabilele sunt excluse din orice garanție. Pentru solicitări de asistență, contactați Serviciul Relații Clienți menționat la sfârșitul manualului.

Această garanție este aplicabilă exclusiv pentru Europa, Rusia, Orientul Mijlociu și Africa. Exclusiv Marea Britanie: Această garanție nu afectează drepturile statutare ale consumatorului. În Europa, orice incident grav (de exemplu, deces, vătămare care pune viața în pericol, intervenție chirurgicală) care a avut loc în legătură cu acest aspirator nazal manual Braun trebuie raportat Kaz Europe (a se vedea numerele serviciului pentru consumatori Helen of Troy) și autorității competente din Statul Membru de care aparțineți.

Este obligatorie comunicarea REF, LOT și a numerelor de serie ale produsului dvs., deoarece acestea sunt esențiale pentru înregistrarea și urmărirea cererii sau a revendicării dumneavoastră. Numerele LOT și de serie sunt indicate pe această foaie.

Data producției este indicată prin numărul de LOT și se poate descifra conform explicației de mai jos:

Primele 3 cifre ale numărului de LOT reprezintă ziua anului de fabricație. Următoarele două cifre reprezintă ultimele două cifre ale anului calendaristic de fabricație, iar literele de la final indică fabricantul produsului. (Ex.: LOT Nr.: 12313tav acest produs a fost fabricat în ziua a 123-a, anul 2013 de producătorul cu codul tav.)

Specificațiile dispozitivului

Model	BNA050
Temperatura de operare	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C ~ +55 °C
Umiditate relativă de funcționare și depozitare	<95 % R.H. fără condensare
Greutate unitară	37 g
Durata de viață	5 ani
Garanție	2 ani

Specificații filtru de unică folosință

Model	BNF020EU
Temperatura de operare	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura de depozitare	-25 °C ~ +55 °C
Umiditate relativă de funcționare și depozitare	<95 % R.H. fără condensare



Filtru de unică folosință



Consultați instrucțiunile de utilizare



Temperatura de operare



Temperatura de depozitare



Dispozitiv medical



Umiditatea de funcționare și depozitare



Număr de referință



Cod lot



Nr. serie



Producător



Data fabricației



Atenție



Reprezentant autorizat în comunitatea Europeană

Prezentul document poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Acest dispozitiv medical poartă marcajul CE și este fabricat în conformitate cu directiva și/sau reglementările aplicabile, conform specificațiilor din Declarația de conformitate UE.



1. Alegeți vârful de aspirație adecvat pentru copil în funcție de dimensiunea năzii



2. Asigurați-vă că filtrul este poziționat corect și că recipientul bine fixat de acesta



3a. Introduceți vârful de aspirație adecvat în nara copilului pentru etanșare



3b. Asigurați-vă că acesta este introdus adecvat în nară



3c. Nu introduceți vârful prea adânc



4. Folosiți piesa de gură pentru a aspira secrețiile



5. După utilizare, aruncați filtrul



6a. Dezasamblați și curățați piesele în chiuvetă sau în mașina de spălat vase, cu excepția tubului, numai pe raftul superior



6b. Dezasamblați piesele și fierbeți-le timp de 15 minute (obligatoriu pentru tub)



7. Introduceți noul filtru în suportul filtrului

Date de contact ale serviciului Relații Clienți:

PHIMADAL DISTRIBUTION SRL,
Str. Izlazului, Nr. 3, 077145 Pantelimon, Jud. Ilfov,
Tel: 021-352.01.68, Fax: 021-352.01.61.

www.BraunHealthcare.com

**Helen
of Troy**

Anumite mărci înregistrate sunt utilizate sub licență The Procter & Gamble Company sau a afiliatelor sale.

 Kaz Europe Sarl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne, Elveția


REF BNA050EU