

## Cadru de mers pliabil cu roti

**Cod produs: KY912L-5”**

Manualul utilizatorului



**NOTA: Acest produs este destinat persoanelor cu probleme medicale si ar trebui utilizat sub atenta supraveghere.**

### **Descriere:**

Este un dispozitiv medical ortopedic, pentru sustinerea echilibrului in timpul deplasarii, asezarii sau ridicarii, util atat in interiorul cat si in exteriorul locuintei. Asigura un suport maxim persoanelor cu dizabilitati locomotorii temporale sau permanente, persoanelor aflate in faza de recuperare ca urmare a unor interventii chirurgicale, persoanelor varstnice, cu conditie fizica slaba, echilibru precar. Prin existenta celor doua roti frontale, ajuta pacientul sa inainteze prin simpla impingere a cadrului, fara ridicarea acestuia. Contactul permanent cu solul maresteste siguranta in deplasare si elimina riscul de pierdere a echilibrului.

### **Caracteristici:**

Cadrul de mers este realizat din aluminiu, foarte usor. Picioarele sunt prevazute cu orificii de reglare in inaltime, adaptabile necesitatilor utilizatorului. Se poate plia foarte usor doar prin apasarea butonului aflat pe bara frontala a dispozitivului, in vederea depozitarii si a transportului. Picioarele din fata prevazute cu roti. Picioarele din spate prevazute cu cauciuc antiderapant. Se recomanda inlocuirea acestora in cazul in care se constata un grad ridicat de uzura. Manerele cadrului de mers sunt confectionate din material rezistent, placut la atingere si avand forma ergonomica.

### **Specificatii:**

- Greutate proprie: 2.85 kg
- Greutatea suportata: 100 kg
- Dimensiuni:
  - Latime: 58 cm
  - Adancime: 54 cm
  - Inaltime: 80 – 98 cm

### **ATENTIONARI:**

- Nu depasiti greutatea maxima admisa de fabricant
- Nu lasati pacientul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Nu utilizati in alte scopuri decat cele destinate.
- Nu folositi substante corozive sau materiale abrazive pentru curatare.

### **INTRETINERE:**

- Spalati cu apa calda si detergent cu ajutorul unui burete moale.
- Clatiti cu apa rece si stergeti excesul de apa cu o carpa moale si uscata.
- Ungeti cu regularitate suruburile si butoanele de ajustare pentru o utilizare indelungata.
- Depozitati in loc igienic.