

BASTON
Cod produs: KY920L
Manualul utilizatorului

NOTA: Acest produs este un dispozitiv medical din clasa dispozitivelor pentru mers. Produsul este destinat persoanelor care au nevoie de stabilitate in mers. Acest produs este destinat persoanelor cu probleme medicale si ar trebui utilizat numai sub atenta supraveghere.

Descriere: Bastonul KY920L pentru o mai buna stabilitate in deplasare.

Caracteristici:

- material: aluminiu eloxat
- culoare: argintiu
- reglabil pe inaltime: 71 – 94 cm
- maner din plastic, cu o forma ergonomica
- pufere din cauciuc de foarte buna calitate ce previn alunecarea si confera un grad ridicat de stabilitate.
- greutatea maxima a utilizatorului: 100 kg
- greutate produs: 350g

Reglajul pe inaltime

Se extrage piesa pentru reglarea inaltimii. Aceasta piesa are un ax metalic care blocheaza cele doua tronsoane ale carjei. Tronsonul interior, cel cu amortizorul de cauciuc intra in interiorul tronsonului superior cel cu sprijin pe antebraț. In ambele tronsoane sunt practicate gauri de trecere prin care se introduce axul piesei de reglare pe inaltime. Piesa de reglare extrasa, cele doua tronsoane culiseaza unul fata de celalalt astfel incat lungimea carjei creste sau scade. Cand obtineti lungimea dorita introduceti axul piesei de reglaj prin gaurile de trecere blocand carja la lungimea aleasa.

Reglajul optim al inaltimii carjei: utilizatorul in pozitie verticala cu mana intinsa pe langa corp. Carja in pozitie verticala cu amortizorul pe podea. Manerul de sprijin trebuie sa vina in dreptul incheieturii mainii. Manerul de sprijin al carjei/bastonului trebuie sa se pozitioneze in dreptul incheieturii mainii atunci cand utilizatorul se afla in pozitie verticala cu mana intinsa pe langa corp, iar carja/bastonul se afla vertical cu varful de cauciuc pe podea.

Reglajul suportului de sprijin al antebrațului(pentru modelele de carja cu aceasta forma constructiva)

Se apasa butoanul de reglaj al suportului de sprijin, se trage sau se introduce partea superioara a sprijinului. In acest mod se lungeste sau se scurteaza suportul pentru sprijin de brat.

Atentionare: Nu depasiti greutatea maxim admisa.

Intretinere: Pentru curatare folositi o laveta uscata sau usor umezita. Nu folositi solventi corozivi sau materiale abrazive.

ATENționARI:

- Nu lasati pacientul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Nu utilizati in alte scopuri decat cele destinate.
- Nu folositi substante corozive sau materiale abrazive pentru curatare.

INTRETINERE:

- Spalati cu apa calda si detergent cu ajutorul unui burete moale.
- Clatiti cu apa rece si stergeti excesul de apa cu o carpa moale si uscata.
- Depozitati in loc igienic.