

BASTON CU SEZUT PLIABIL

Cod produs: CA836



REGLAJ SI UTILIZARE:

Bastonul cu sezut pliabil este confectionat din aluminiu eloxat prevazut cu scaun pentru persoanele care simt nevoia de odihna in timpul deplasarilor.

Bastonul ofera o sustinere a unei greutati de pana la 100kg.

Sezutul este confectionat din plastic iar manerul este din spuma poliuretunica pentru a asigura o prindere ferma si a preveni alunecarea.

Cu o greutate de numai 900g si o inaltime de 84.5cm este ideal pentru persoanele cu dificultati de deplasare care au nevoie de odihna pe perioade scurte.

Nota: Pentru utilizarea corecta a dispozitivelor medicale destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in vederea recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice cereti sfatul medicului ortoped sau kineto-terapeut.

Dispozitivul medical face parte din clasa dispozitivelor de mers si este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, pentru a le facilita deplasarea.

Dispozitivul medical este usor de utilizat si foarte comod.

NOTA: Acest produs este un dispozitiv medical din clasa dispozitivelor pentru mers. Produsul este destinat persoanelor care au nevoie de stabilitate in mers. Acest produs este destinat persoanelor cu probleme medicale si ar trebui utilizat numai sub atenta supraveghere.

ATENTIONARI:

- Nu lasati pacientul nesupravegheat in timpul utilizarii.
- Nu utilizati in alte scopuri decat cele destinate.
- Nu folositi substante corozive sau materiale abrazive pentru curatare.
- Produsul nu ar trebui utilizat fara instructiuni din partea unui asistent specializat in ingrijirea persoanelor cu deficiente.
- Nu depasiti greutatea maxima admisa de fabricant!
- Nu ne facem raspunzatori de nici o vatamare sau ranire cauzata de utilizarea incorecta sau asamblarea eronata a produsului.

INTRETINERE:

- Spalati cu apa calda si detergent cu ajutorul unui burete moale.
- Clatiti cu apa rece si stergeti excesul de apa cu o carpa moale si uscata.
- Nu folositi detergenti sau alte substante chimice pentru curatare.
- Nu folositi materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului si al protectiei materialului din care este confectionat.
- Ungeti cu regularitate suruburile si butoanele de ajustare pentru o utilizare indelungata.
- Depozitati in loc igienic.