

TONIMER lab:

PANTHEXYL BABY SPRAY

Apă de mare soluție hipertonică sterilă pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului din pasajul nazal, indicată pentru sugari și copii în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană, cum ar fi naso-faringită sau sinuzită și pentru a preveni otita medie acută datorată depunerii de mucus în urechea mijlocie.

Îmbogățită cu Xilitol și Pantenol, soluția hipertonică PANTHEXYL BABY SPRAY igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația.

Supapa de reținere și sacul care izolează soluția:

- garantează sterilitatea
- face posibilă utilizarea flaconului în orice direcție
- previne aspirarea mucusului în flacon.

Instrucțiuni de utilizare:

1. După scoaterea capacului, adulții și copiii care sunt capabili să utilizeze singuri produsul, pot utiliza Tonimer în orice poziție. Totuși, este recomandat să vă aplecați peste o chiuvetă, să

țineți capul înclinat pe o parte și să introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă. Apăsăți aplicatorul pentru aproximativ 5 secunde pentru ca produsul să fie eliberat. Repetați aceeași procedură cu cealaltă nară (desen 1).



1)

2. În cazul copiilor care au nevoie de ajutorul unui adult: așezați copilul în poziție culcată, pe o parte, introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă și apăsați pentru aproximativ 5 secunde. Așezați copilul pe cealaltă parte și repetați cu cealaltă nară (desen 2).



2)

3. După utilizare, curățați și uscați aplicatorul și închideți ambalajul cu ajutorul sistemului său de blocare special.

Frecvența de utilizare:

- de la 0 la 3 luni: de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului;
- după vârsta de 3 luni: de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului;

AVERTIZARE: Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate la ingrediente. În cazul efectelor secundare, opriți utilizarea și consultați medicul. Dacă produsul ajunge în ochi, spălați cu multă apă.

Avertizare: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri decât pentru cele specificate.

STERILE R

CE 0546



ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy
- istituto@ganassini.it

Distribuitoare:

Alliance Healthcare România S.R.L.
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,
Sector 6, București
Telefon: (+4) 021-4077711