

TONIMER lab:

HIPERTONIC FLACOANE UNIDOZĂ

Apă de mare soluție hipertonică sterilă, pentru decongestionarea mucoasei nazale și fluidificarea mucusului. Indicată pentru a curăța fosele nazale în timpul răcelilor și în mod particular, pentru decongestia mucoasei nazale în fazele acute de rinită alergică, sinuzită și rino-sinuzită. De asemenea, este ideală pentru aerosoli.

Mod de utilizare:

1. Rupeți partea superioară a flaconului prin mișcare de rotație.
2. Așezați copilul pe o parte, introduceți vârful flaconului în nara care este în poziția mai înaltă și apăsați. Așezați

copilul pe cealaltă parte și repetați cu cealaltă nară (desen 1).



1)

3. Pentru copiii care sunt capabili să utilizeze produsul singuri, este recomandat să se aplece peste o chiuvetă, să-și mențină capul înclinat pe o parte, să introducă vârful flaconului în nara care este în poziția mai înaltă și să apese. Se repetă aplicarea cu cealaltă nară (desen 2).



2)

Frecvența de utilizare:

Utilizați jumătate din conținutul unui flacon în fiecare nară și repetați

aplicarea la fiecare 3-4 ore, nu mai mult de 2-3 ori pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului.

Avertizare: Nu se injectează. Nu vă suflați nasul timp de 10 minute după administrare. Nu reutilizați după deschidere: este posibil ca produsul să nu mai fie steril. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. În cazul efectelor secundare, opriți utilizarea și consultați medicul. Păstrați produsul ferit de lumină și nu-l expuneți la temperaturi peste 40°C.



ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy
- istituto@ganassini.it

Distribuitor:

Alliance Healthcare România S.R.L.
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,
Sector 6, București
Telefon: (+4) 021-4077711