

FLACOANE UNIDOZĂ

Apă de mare, soluție izotonică sterilă pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului din fosele nazale ale bebelușilor și copiilor în caz de uscăciune a mucoasei nazale și răceli, precum și pentru îndepărtarea secrețiilor oculare. Practic și ușor de utilizat, flacoanele unidoză îndepărtează și fluidifică mucusul fără afectarea pH-ului fiziologic al mucoasei nazale. Pot fi, de asemenea, utilizate pentru îndepărtarea secrețiilor oculare ale copilului dumneavoastră sau pentru instilare în ochi în cazul înroșirii ochilor, iritație și durere provocate de factorii de mediu (soare, vânt, praf, polen, fum, mediu uscat). De asemenea, este ideal pentru aerosoli.

Mod de utilizare:

1. Rupeți partea superioară a flaconului rotind-o în mod constant.

2. Așezați copilul pe o parte, introduceți vârful flaconului în nara care este în poziția mai înaltă și

apăsați. Așezați copilul pe cealaltă parte și repetați cu cealaltă nară (desen 1).



1)

3. Pentru copiii care sunt capabili să utilizeze produsul singuri, este recomandat să se aplece peste o chiuvetă, să-și mențină capul înclinat pe o parte, să introducă vârful flaconului în nara care este în poziția mai înaltă și să apese. Se repetă aplicarea cu cealaltă nară (desen 2).



2)

Frecvența de utilizare:

Utilizați jumătate din conținutul unui flacon în fiecare nară, în caz de necesitate, cel puțin o dată pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu

sfatul medicului.

În cazul instilării în ochi, utilizați la nevoie, cel puțin o dată pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului.

În cazul administrării prin aerosoli, utilizați o dată sau de două ori pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului.

Avertizare:

Nu se injectează. Nu vă suflați nasul timp de 10 minute după administrare. În cazul instilării în ochi, capătul flaconului nu trebuie să vină în contact cu pleoapele și ochiul. Nu reutilizați după deschidere: este posibil ca produsul să nu mai fie steril. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Protejați produsul de lumină și nu-l expuneți la temperaturi peste 40°C.



ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche

Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy

· istituto@ganassini.it

Distribuito:

Alliance Healthcare România S.R.L.

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,

Sector 6, București

Telefon: (+4) 021-4077711