

# TONIMER lab:

## PANTHEXYL SPRAY

Apă de mare soluție hipertonică, sterilă pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului în pasajele nazale, indicată pentru adulți în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană, cum ar fi nasofaringită și sinuzită, pentru a preveni otita medie acută datorată depunerii de mucus în urechea mijlocie și pentru tratamentul post-operator la nivelul sinusurilor.

Îmbogățită cu Xilitol și Pantenol, soluția hipertonică PANTHEXYL SPRAY igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația.

Supapa de reținere și sacul care izolează soluția:

- garantează sterilitatea
- face posibilă utilizarea flaconului în orice direcție
- previne aspirarea mucusului în flacon.

### Instrucțiuni:

1. După scoaterea capacului, puteți utiliza produsul în orice poziție. Totuși, este recomandat să vă aplecați peste o chiuveță, să țineți capul înclinat pe o parte și să introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă. Apăsati aplicatorul pentru aproximativ 5 secunde pentru ca produsul să fie eliberat. Repetați aceeași procedură cu cealaltă nară (desen 1).



1)

2. După utilizare, curățați și uscați aplicatorul și închideți ambalajul cu ajutorul sistemului său de blocare special.

### Frecvența de utilizare:

de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile sau conform recomandărilor medicului dumneavoastră.

**Avertizare:** Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate la ingrediente. În cazul efectelor secundare, opriți utilizarea și consultați medicul. Dacă produsul ajunge în ochi, spălați cu multă apă.

**Avertizare:** Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri decât pentru cele specificate.

STERILE R

CE 0546



**ISTITUTO GANASSINI S.p.A.**

di Ricerche Biochimiche

Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy

istituto@ganassini.it

### Distribuitoare:

**Alliance Healthcare România S.R.L.**

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,

Sector 6, București

Telefon: (+4) 021-4077711