

TONIMER lab:

HIPERTONIC și HIPERTONIC BABY SPRAY

Apă de mare soluție hipertonică sterilă, pentru decongestionarea mucoasei nazale și fluidificarea mucusului. Indicat pentru a curăța fosele nazale în timpul răcelilor și în mod particular, pentru decongestia mucoasei nazale în fazele acute de rinită alergică, sinuzită și rinosinuzită. Tonimer este practic și ușor de utilizat, și nu conține conservanți sau gaze propulsoare în contact cu produsul, reducând astfel riscul de a provoca reacții alergice.

Supapa de reținere și sacul care izolează soluția:

- garantează sterilitatea
- face posibilă utilizarea flaconului în orice direcție
- previne aspirarea mucusului în flacon.

Instrucțiuni:

1. După scoaterea capacului, adulții și copiii care sunt capabili să utilizeze singuri produsul, pot utiliza Tonimer în orice poziție. Totuși, cel mai bine este să vă aplecați peste o chiuveță, să țineți capul înclinat pe o parte și să introduceți aplicatorul în nara care este în poziția



1)

mai înaltă. Apăsați aplicatorul până când produsul este pulverizat. Repetați aceeași procedură cu cealaltă nară (desen 1).

2. În cazul nou-născuților și copiilor mici, așezați copilul jos pe o parte, introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă și apăsați. Așezați copilul pe cealaltă parte și repetați cu cealaltă nară (desen 2).



2)

3. După utilizare, curățați și uscați aplicatorul și închideți ambalajul cu ajutorul sistemului său de blocare special.

Frecvența de utilizare:

utilizați la fiecare 3-4 ore, de 2-3 ori pe zi, timp de 15 zile sau în conformitate cu sfatul medicului.

AVERTIZARE:

dacă produsul a intrat în ochi, spălați cu multă apă. În cazul efectelor secundare, opriți utilizarea și consultați medicul.

Avertizare: Recipient sub presiune:

Poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate.

STERILE R

CE 0546

ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano - Italy
- istituto@ganassini.it

Distribuito:

Alliance Healthcare România S.R.L.
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,
Sector 6, București
Telefon: (+4) 021-4077711