

TONIMER lab:

ISOTONIC SPRAY

Apă de mare soluție sterilă izotonică, formulată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului din pasajele nazale, în caz de uscăciune a membranei mucoasei nazale și răceli. Tonimer este practic și ușor de utilizat și nu conține conservanți sau gaze propulsoare în contact cu produsul, reducând astfel posibilitatea de a provoca reacții alergice.

Supapa de reținere și sacul care izolează soluția:

- garantează sterilitatea
- face posibilă utilizarea flaconului în orice direcție
- previne aspirarea mucusului în flacon.

Instrucțiuni de utilizare:

1. După scoaterea capacului, adulții și copiii care sunt capabili să utilizeze singuri produsul, pot utiliza Tonimer în orice poziție. Totuși, este recomandat să vă aplecați peste o chiuvetă, să țineți capul înclinat pe o parte și să introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă. Apăsăți aplicatorul până

când produsul este pulverizat. Repetați aceeași procedură cu cealaltă nară (desen 1).



1)

2. În cazul nou-născuților și copiilor mici, așezați copilul jos pe o parte, introduceți aplicatorul în nara care este în poziția mai înaltă și apăsați. Așezați copilul pe cealaltă parte și repetați cu cealaltă nară (desen 2).



2)

3. După utilizare, curățați și uscați aplicatorul și închideți ambalajul cu ajutorul sistemului său de blocare special.

Frecvența de utilizare:

după cum este necesar în mod individual, de mai multe ori pe zi, timp de 15 zile sau în

conformitate cu sfatul medicului.

AVERTIZARE:

dacă produsul intră în ochi, spălați cu multă apă.

Avertizare: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate.

STERILE R

CE 0546



ISTITUTO GANASSINI S.p.A.

di Ricerche Biochimiche

Via P. Gaqqia 16 - 20139 Milano - Italy

· istituto@ganassini.it

Distribuitoare:

Alliance Healthcare România S.R.L.

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,

Sector 6, București

Telefon: (+4) 021-4077711