

Ovulimi zjgat për një periudhë të shkurtër (deri në 12 orë) gjatë së cilës qeliza vezë mund të fekondohet. Është e rëndësishme të theksohet se ovulimi nuk ndodh në çdo cikël. Njëherë në 13 cikle ndodh një cikël jo ovulator (cikël menstrual pa ovulim).

Çfarë është cikli menstrual?

Cikli menstrual është periudha nga dita e parë e menstruacioneve deri në ditën përpara menstruacioneve të radhës. Mesatarisht cikli zjgat 28 ditë.

Çfarë është "shpërthimi i LH"?

"Shpërthimi LH" është momenti kur organizmi prodhon sasinë më të lartë të hormonit luteinizues. Kur hormoni luteinizues kapet, **Oview** shfaq një rezultat pozitiv që është shenjë që ovulimi do të ndodhë në 24-48 orët pasardhëse.

Mundet që Oview të tregojë një rezultat të rremë?

Një rezultat i rremë mund të dalë nëse:

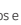


- Merrni ilaçe për fertilitet që përbajnë hormon lutenizues (LH) ose hormoni i gonadotropinës korionike humane (HCG).
- Merrni mjekime që ndikojnë në kohëzgjatjen e ciklit tuaj. Kini parasysh që kjo ndryshon ditët që duhet të bëni testin.
- Jeni menopausalisht shtatëzënë, keni qenë së fundmi shtatëzënë ose jeni në menopauzë.

I ndoqa udhëzimet me rigorozitet, por të gjitha rezultatet janë negative. Çfarë duhet të bëj?

Jo të gjitha femrat ovulojnë në mes të ciklit menstrual. Bëjeni testin sërish sepse ndoshta nuk keni ovular akoma.

E kam përdorur Oview prej disa muajsh, por nuk mund të ngel shtatëzënë. Çfarë duhet të bëj?

Është e zakonshme që mos të ngelni shtatëzënë për disa muaj dhe mund të ketë arsye të ndryshme. Në këto raste, ju lutem të kësilloheni me mjekun tuaj. Për të maksimizuar mundësitë për të ngelur shtatëzënë, duhet të kryeni marrëdhënie ditën përpara ovulimit, ditën e ovulimit dhe në ditën pas ovulimit.

Çdo kuti Oview përmban: 5 qese dhe udhëzuesin e përdorimit; çdo qese përmban një shirit LH dhe një desikant (agjent përthithës lagështie. Mos e hapni, gjellitisi ose përdorni). **Importues dhe Distributor:** Trimed Sh.p.k. Autostrada Tiranë-Durrës km.10, Tiranë, Albania; tel.: +355 45 601088.  Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd., Beijia Industry Zone, PRC 102209.  Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Hamburg, Germany.  Mbajeni larg fëmijëve, jo për përdorim të brendshëm, nuk ka nevojë për trajnim shtesë, mos bëni veprime të tjera pa u këshilluar me mjekun specialist; testi është për vetë-testim, mbajeni larg nga rrezet e drejtëpërdrejta të diellit, ruhet në ditë lagështisë; përdorni testin menjëherë pasi keni hapur qesen; mos e përdorni testin nëse qesia është e dëmtuar; mos e hapni desikantin. Ndjeshmëria e testit: 25 mIU/ml. **Testi duhet të ruhet në temperaturë nga 4 – 30°C.**

Oview prodhohet për **Unicoms Switzerland GmbH**                                                                              

